

MEDCORP®

SAÚDE E TECNOLOGIA

Grip-Lok®

TIDI PRODUCTS
Care with Confidence



MEDCORPNET.COM.BR

    medcorpnet

DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO SEM SUTURA



Praticidade e simplicidade

O Grip-Lok® é um dispositivo versátil e de fácil aplicação para a **estabilização** e **fixação** de cateteres, drenos e sondas.

Tecnologia

O Grip-Lok® é embalado e esterilizado individualmente. Sua fita adesiva é **hipoalergênica** e livre de látex, reduzindo o risco de erupções e irritações cutâneas.

Fixação e segurança


A fita autocolante do Grip-Lok® mantém a fixação de cateteres, sondas e drenos, impedindo deslocamentos, minimizando riscos de tração e dispensando o uso de sutura no dispositivo.

O Grip-Lok® é universal e pode ser usado em:


- ▶ cateter central de inserção periférica – PICC;
- ▶ cateteres venosos centrais – CVC;
- ▶ cateteres vesicais;
- ▶ sondas;
- ▶ drenos cirúrgicos.

Passo a passo


Prepare a pele do paciente de acordo com o protocolo institucional. A pele deve estar limpa e seca. Se houver necessidade, realize a retirada dos pelos para melhor aderência do Grip-Lok®.

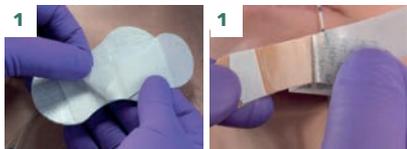


1 Abra o velcro, levante o tecido superior e remova o revestimento interno.

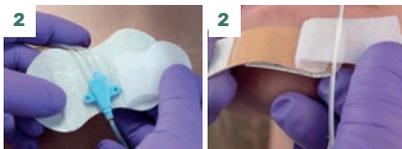

2 Deslize o Grip-Lok® sob o cateter centralizando a aba de fixação do cateter ou o cateter na área adesiva de base exposta.

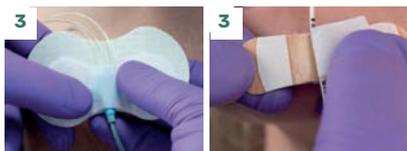

3 Cubra o cateter com o tecido superior, pressione o adesivo em torno do cateter/dos lúmens para fixá-lo firmemente e feche o velcro.

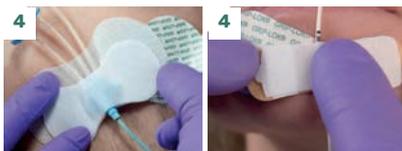

4 Enquanto segura o Grip-Lok® e o cateter com uma mão, remova a fita de um dos lados e fixe-a na pele. Em seguida, repita o procedimento do outro lado, concluindo a instalação com sucesso.



Fixação do curativo cobrindo óstio e estabilizador.

Remoção do fixador

A utilização de cotonete embebido em álcool ou swab de álcool facilita a remoção do dispositivo de fixação da pele. Substitua o dispositivo de fixação caso esteja sujo ou impregnado de líquidos. Produto de uso único. A reutilização do dispositivo pode alterar suas características mecânicas ou biológicas e pode causar falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecção.

Dispositivo de Fixação e Estabilização sem Sutura – Grip-Lok®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
3601CVC	UNIVERSAL MÉDIO PARA PICC, CVC, LINHAS E TUBOS E DRENOS	8,9 cm (COMPRIMENTO) x 5,2 cm (LARGURA)
2200NUZA	EXTRA PEQUENO COM ÓXIDO DE ZINCO	5,7 cm (COMPRIMENTO) x 1,778 cm (LARGURA)

Grip-Lok®



 medCOMP

 icumedical
human connections

 AVANOS

 TIDI PRODUCTS
Care with Confidence

 DORA®

 Jafron

 aspensurgical

Escritório

Rua Arminda, 93 – 3º andar
CEP: 04545-100 – Vila Olímpia
São Paulo, SP, Brasil
Tel.: +55 11 3849.8992
E-mail: site@medcorpnet.com.br

Matriz/Centro de Distribuição

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
CEP: 09950-300 – Piraporinha
Diadema, SP, Brasil
Tel.: +55 11 4067.5011
E-mail: site@medcorpnet.com.br

MEDCORPNET.COM.BR

    medcorpnet

REV. 2

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

CNPJ: 67.630.541/0001-74

Os direitos sobre o conteúdo deste material são de titularidade exclusiva da Medcorp Saúde Tecnologia Ltda., a quem cabe, unicamente, o direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento total ou parcial deste documento por terceiros, por qualquer forma, sem prévia autorização escrita da autora, nos termos da Lei 9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.