

Ficha Técnica



Indicador de temperatura termocrômico para verificação imediata e constante da temperatura corporal.

Para uma indicação precisa da temperatura corporal, recomendamos a colocação no pescoço, tórax, axilas ou testa.

Mecanismo de Ação

É um dispositivo sensível ao calor, em contato com a pele pode ocorrer alterações na colocação dependendo da temperatura corporal do paciente.

Em baixas temperaturas entre 33,5 °C a 34,5 °C a cor ficará castanha, temperaturas entre 35 °C a 37 °C o dispositivo ficará verde e temperaturas acima de 37,5 °C o dispositivo ficará amarelo.

Precisão da cor do T° Patch pode variar de acordo com a temperatura corporal com uma precisão de +/- 0,2 °C.

Especificações

Modelos TP32 e TP08

Cartela com 32 unidades e com 8 unidades de adesivos térmicos descartáveis indicadores da temperatura corporal.

Diâmetro	1,8 cm
Espessura	0,05 cm

Registro Anvisa: 10312210096