

## DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO SEM SUTURA



### Praticidade e simplicidade

O Grip-Lok® é um dispositivo versátil e de fácil aplicação para a **estabilização** e **fixação** de cateteres, drenos e sondas.

### Tecnologia

O Grip-Lok® é embalado e esterilizado individualmente. Sua fita adesiva é **hipoalergênica** e livre de látex, reduzindo o risco de erupções e irritações cutâneas.

### Fixação e segurança

A fita autocolante do Grip-Lok® mantém a fixação de cateteres, sondas e drenos, impedindo deslocamentos, minimizando riscos de tração e dispensando o uso de sutura no dispositivo.

### O Grip-Lok® é universal e pode ser usado em:


- ▶ cateter central de inserção periférica – PICC;
- ▶ cateteres venosos centrais – CVC;
- ▶ cateteres vesicais;
- ▶ sondas;
- ▶ drenos cirúrgicos.

## DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇÃO E FIXAÇÃO SEM SUTURA




### Passo a passo

Prepare a pele do paciente de acordo com o protocolo institucional. A pele deve estar limpa e seca. Se houver necessidade, realize a retirada dos pelos para melhor aderência do Grip-Lok®.

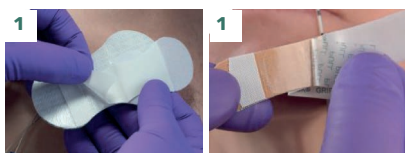


Abra o velcro, levante o tecido superior e remova o revestimento interno.

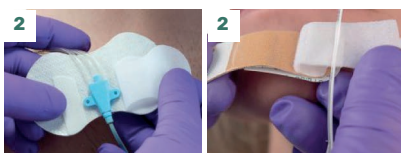

Deslize o Grip-Lok® sob o cateter centralizando a aba de fixação do cateter ou o cateter na área adesiva de base exposta.



Cubra o cateter com o tecido superior, pressione o adesivo em torno do cateter/dos lúmens para fixá-lo firmemente e feche o velcro.

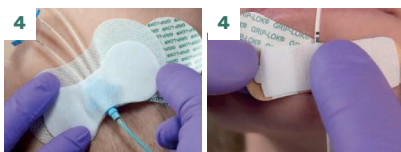

Enquanto segura o Grip-Lok® e o cateter com uma mão, remova a fita de um dos lados e fixe-a na pele. Em seguida, repita o procedimento do outro lado, concluindo a instalação com sucesso.



Fixação do curativo cobrindo óstio e estabilizador.

### Remoção do fixador

A utilização de cotonete embebido em álcool ou swab de álcool facilita a remoção do dispositivo de fixação da pele. Substitua o dispositivo de fixação caso esteja sujo ou impregnado de líquidos. Produto de uso único. A reutilização do dispositivo pode alterar suas características mecânicas ou biológicas e pode causar falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecção.

### Dispositivo de Fixação e Estabilização sem Sutura – Grip-Lok®

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS
3601CVC	UNIVERSAL MÉDIO PARA PICC, CVC, LINHAS E TUBOS E DRENOS	8,9 cm (COMPRIMENTO.) x 5,2 cm (LARGURA)
2200NUZA	EXTRA PEQUENO COM ÓXIDO DE ZINCO	5,7 cm (COMPRIMENTO) x 1,778 cm (LARGURA)