



MATERIAL ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO GUIA DE AGULHA PARA ULTRASSOM PROV ACCESS

A instrução de uso se aplicam aos produtos:
5430, 5431, 5404, 5403, 5402, 5405, 5406 e 5401

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

As guias de agulha para ultrassom Prov Access são indicadas para auxiliar o profissional na inserção da agulha de forma precisa, pois direciona a agulha e atinge uma profundidade desejada com o auxílio de um ultrassom. Utilizado em procedimentos para peças pequenas, biópsias de tecidos, aspirações de líquidos, biópsias de rim/fígado e acesso vascular.

DESCRIÇÃO

São Guias de Agulhas para ultrassom descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO

5430 – Contém 3 Guias de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 1.0cm, 1.5cm, 2.0cm
5431 - Contém 3 Guias de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 0.5cm, 1.0cm, 1.5cm
5404 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 0.5cm
5403 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 1.0cm
5402 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 1.5cm
5405 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 2.0cm
5406 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 2.5cm
5401 – Contém 1 Guia de agulha para ultrassom Prov Access 18/21Ga de profundidade 3.5cm

	Guia de agulha Amarelo 18/21G profundidade de 0.5cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm
	Guia de agulha Azul 18/21G profundidade de 1.0cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm
	Guia de agulha Branco 18/21G profundidade de 1.5cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm
	Guia de agulha Verde 18/21G profundidade de 2.0cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm
	Guia de agulha Rosa 18/21G profundidade de 2.5cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm
	Guia de agulha Vermelho 18/21G profundidade de 3.5cm Comprimento: 2,2cm; Espessura: 1,5cm; Altura: 1,8cm

As guias de agulha para ultrassom Prov Access são compostas de Polietileno e Policarbonato. Embalagem com cartela com 1 ou 3 guias de agulha e caixa com 10 cartelas.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

As guias de agulhas são adaptadas para agulhas de calibre 18-21Ga direcionam a agulha de forma que esta atravesse a pele e acesse o vaso a uma profundidade pré-determinada.

MODO DE USO

1. Selecione o guia de agulha para alcançar a profundidade desejada.
2. Retire as guias de agulha para ultrassom Prov Access da embalagem utilizando técnicas assépticas.
3. Encaixe a guia da agulha na abraçadeira ou diretamente no transdutor. Certifique-se que a guia esteja bem fixa e alinhada.
4. Insira a agulha com comprimento adequado na guia de forma que atinja a profundidade desejada.
5. Após a finalização, retirar a agulha da guia.

PRAZO DE VALIDADE

3 anos

ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Mantenha o produto longe de alta temperatura, luz solar direta e gás corrosivo durante o transporte.
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.
Manter a embalagem unitária intacta.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.

Fabricante recomenda Uso Único.

O reprocessamento ou reutilização, pode criar risco de contaminação cruzada, paciente infeccionado e/ou mau funcionamento do produto.

FABRICANTE:

Aspen Surgical Products Inc
6945 Southbelt Drive SE, Caledonia, Michigan 49316, EUA
Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 Piraporinha – Diadema-SP - CEP:09.950-300
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210090

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceticocoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 02/2025