



MATERIAL ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO  
KIT DE COBERTURA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR CLEAR DOBRADA

A instrução de uso se aplicam aos produtos:  
1240, 1270, 1460 e 1512

INSTRUÇÕES DE USO

**INDICAÇÃO:**  
O Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada é indicado para proteger e prolongar a vida do equipamento, evitar que o sangue e contaminantes entre em áreas difíceis de limpar, facilitar a manutenção de um campo estéril durante o uso com o ultrassom em diversos procedimentos

**DESCRIÇÃO**  
Kit com uma cobertura para transdutor estéril e descartável, sachê de gel estéril de 20g e 1 par de elástico.

ESPECIFICAÇÃO



| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEASCRICÃO                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código 1240                                                                                                                                                                                                                                                              | Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada 10,2cm x 61cm<br>Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom com extremidade 3D, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.   |
| Código 1270                                                                                                                                                                                                                                                              | Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada 17,8cm x 61cm<br>Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom sem extremidade 3D, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.   |
| Código 1460                                                                                                                                                                                                                                                              | Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada telescopicamente 15,2cm x 121,9cm<br>Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.  |
| Código 1512                                                                                                                                                                                                                                                              | Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada 12,7cm x 30,5cm<br>Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom sem extremidade 3D, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha. |
| COMPOSIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
| Cobertura para Transdutor de Ultrassom com e sem extremidade 3D - composto de Polietileno.<br>Sachê de Gel estéril 20g - composto de Polímero, umectante, água purificada, metilparabeno e propilparabeno<br>Elástico de borracha - composto de Poliisopreno, sem látex. |                                                                                                                                                                                                        |

Embalagem com 1Kit e caixa com 24 kits.

**PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**  
O gel estéril é colocado dentro da cobertura para transdutor de ultrassom e serve como meio de contato para transmissão ultra-sônica. A cobertura para transdutor serve para cobrir o transdutor e sua extensão. Os elásticos de borracha são colocados para prender a cobertura e evitar a contaminação durante o procedimento.

**MODO DE USO**  
1. Retire os componentes do Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear dobrada da embalagem utilizando técnicas assépticas.  
2. Pegue a cobertura para o transdutor e aperte os lados para abrir a proteção.  
3. Espalhe gel dentro da cobertura para o transdutor.  
4. Coloque o transdutor de ultrassom dentro da cobertura e ajuste para não ficar rugas ou bolhas de ar.  
5. Puxe a cobertura do transdutor por toda extensão.  
6. Utilize os elásticos de borracha para prender a base do transdutor.  
7. Use gel estéril entre o protetor e o paciente.

**PRAZO DE VALIDADE**  
3 anos

**ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno**

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**  
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Mantenha o produto longe de alta temperatura, luz solar direta e gás corrosivo durante o transporte.  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.  
Manter a embalagem unitária intacta.

**ADVERTÊNCIAS**  
Não contém látex.  
Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.  
**Fabricante recomenda Uso Único.**  
O reprocessamento ou reutilização, pode criar risco de contaminação cruzada, paciente infeccionado e/ou mau funcionamento do produto.  
O gel estéril não contém álcool.

**FABRICANTE:**  
Aspen Surgical Products Inc  
6945 Southbelt Drive SE, Caledonia, Michigan 49316, EUA  
Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO**  
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.  
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 Piraporinha – Diadema-SP - CEP:09.950-300  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210092

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 02/2025