



## MATERIAL ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO KIT DE COBERTURA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR CLEAR PULLUP™

A instrução de uso se aplicam aos produtos:  
1096

### INSTRUÇÕES DE USO

#### INDICAÇÃO:

O Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear PullUp™ é indicado para proteger e prolongar a vida do equipamento, evitar que o sangue e contaminantes entre em áreas difíceis de limpar, facilitar a manutenção de um campo estéril durante o uso com o ultrassom em diversos procedimentos.

#### DESCRIÇÃO

Kit com uma cobertura para transdutor estéril e descartável, sachê de gel estéril de 20g e 1 par de elástico.

#### ESPECIFICAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Código 1096	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear PullUp™ 12,7cm x 121,90cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom PullUp, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
COMPOSIÇÃO	
Cobertura para Transdutor de Ultrassom PullUp - composto de Polietileno + tyvek Sachê de Gel estéril 20g - composto de Polímero, umectante, água purificada, metilparabeno e propilparabeno Elástico de borracha - composto de Poliisopreno, sem látex	

Embalagem com 1Kit e caixa com 24 kits.

#### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O gel estéril é colocado dentro da cobertura para transdutor de ultrassom e serve como meio de contato para transmissão ultra-sônica. A cobertura para transdutor serve para cobrir o transdutor e sua extensão. Os elásticos de borracha são colocados para prender a cobertura e evitar a contaminação durante o procedimento.

#### MODO DE USO

1. Retire os componentes do Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Clear PullUp™ da embalagem utilizando técnicas assépticas.
2. Pegue a cobertura para o transdutor e aperte as laterais para abrir a proteção.
3. Espalhe gel dentro da cobertura.
4. Coloque o transdutor de ultrassom dentro da cobertura e ajuste para não ficar rugas ou bolhas de ar.
5. Puxe a cobertura do transdutor por toda extensão.
6. Utilize os elásticoS de borracha para prender a base do transdutor.
7. Use gel estéril entre o protetor e o paciente.

#### PRAZO DE VALIDADE

3 anos

#### ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno

#### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Mantenha o produto longe de alta temperatura, luz solar direta e gás corrosivo durante o transporte.  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.  
Manter a embalagem unitária intacta.

#### ADVERTÊNCIAS

Não contém látex.  
Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.  
Fabricante recomenda Uso Único.

O reprocessamento ou reutilização, pode criar risco de contaminação cruzada, paciente infectado e/ou mau funcionamento do produto.  
O gel estéril não contém álcool.

#### FABRICANTE:

Aspen Surgical Products Inc  
6945 Southbelt Drive SE, Caledonia, Michigan 49316, EUA  
Estados Unidos

#### DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.  
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 Piraporinha – Diadema-SP - CEP:09.950-300  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210094

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 01/2025