



MATERIAL ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO
KIT DE COBERTURA ESTÉRIL PARA TRANSDUTOR SOFT DOBRADA

A instrução de uso se aplicam aos produtos:
2210, 2230, 2236, 2250, 2270, 2320 e 2450

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:
O Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft Dobrada é indicado para proteger e prolongar a vida do equipamento, evitar que o sangue e contaminantes entre em áreas difíceis de limpar, facilitar a manutenção de um campo estéril durante o uso com o ultrassom em diversos procedimentos.

DESCRIÇÃO
Kit com uma cobertura para transdutor estéril e descartável, sachê de gel estéril de 20g e 1 par de elástico.

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Código 2210	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada telescopicamente 15cm x 147cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2230	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada 8,9cm x 61cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2236	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada 8,9cm x 91,4cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2250	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada 14cm x 61cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2270	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada 17,8cm x 61cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2320	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada telescopicamente 14cm x 91,4cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
Código 2450	Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft dobrada telescopicamente 14cm x 121,9cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g e elástico de borracha.
COMPOSIÇÃO	
Cobertura para Transdutor de Ultrassom com e sem extremidade 3D - composto de Poliuretano. Sachê de Gel estéril 20g - composto de Polímero, umectante, água purificada, metilparabeno e propilparabeno Elástico de borracha - composto de Poliisopreno, sem látex.	

Embalagem com 1Kit e caixa com 24 kits.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
O gel estéril é colocado dentro da cobertura para transdutor de ultrassom e serve como meio de contato para transmissão ultra-sônica. A cobertura para transdutor serve para cobrir o transdutor e sua extensão. Os elásticos de borracha são colocados para prender a cobertura e evitar a contaminação durante o procedimento.

MODO DE USO
1. Retire os componentes do Kit de Cobertura Estéril para Transdutor Soft Dobrada da embalagem utilizando técnicas assépticas.
2. Pegue a cobertura para o transdutor e aperte os lados para abrir a proteção.
3. Espalhe gel dentro da cobertura para o transdutor.
4. Coloque o transdutor de ultrassom dentro da cobertura e ajuste para não ficar rugas ou bolhas de ar.
5. Puxe a cobertura do transdutor por toda extensão.
6. Utilize os elásticos de borracha para prender a base do transdutor.
7. Use gel estéril entre o protetor e o paciente.

PRAZO DE VALIDADE
3 anos

ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Mantenha o produto longe de alta temperatura, luz solar direta e gás corrosivo durante o transporte.
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.
Manter a embalagem unitária intacta.

ADVERTÊNCIAS
Não contém látex.
Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.
Fabricante recomenda Uso Único.

O reprocessamento ou reutilização, pode criar risco de contaminação cruzada, paciente infeccionado e/ou mau funcionamento do produto.
O gel estéril não contém álcool.

FABRICANTE:
Aspen Surgical Products Inc
6945 Southbelt Drive SE, Caledonia, Michigan 49316, EUA
Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 Piraporinha – Diadema-SP - CEP:09.950-300
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210093

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 01/2025