



KIT GUIA DE AGULHA
KIT PROV ACCESS CLEAR PULLUP™

A instrução de uso se aplicam aos produtos:
5410, 5414, 5415, 5416 E 5417

INSTRUÇÕES DE USO	
INDICAÇÃO: O Kit Prov Access Clear PullUp™ é indicado para proteger e prolongar a vida do equipamento, evitar que o sangue e contaminantes entre em áreas difíceis de limpar, facilitar a manutenção de um campo estéril durante o uso com o ultrassom em diversos procedimentos. As guias de agulha para ultrassom Prov Access são indicadas para auxiliar o profissional na inserção da agulha de forma precisa, pois direciona a agulha e atinge uma profundidade desejada com o auxílio de um ultrassom. Utilizado em procedimentos para peças pequenas, biópsias de tecidos, aspirações de líquidos, biópsias de rim/fígado e acesso vascular.	
DESCRIÇÃO São Guias de Agulhas para ultrassom descartável e estéril.	
ESPECIFICAÇÃO	
Código 5410	Kit Prov Access Clear PullUp™ 1.0cm, 1.5cm, 3.5cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g, elástico de borracha e 3 guias de agulha.
Código 5414	Kit Prov Access Clear PullUp™ 1.0cm, 1.5cm, 2.0cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g, elástico de borracha e 3 guias de agulha.
Código 5415	Kit Prov Access Clear PullUp™ 1.5cm, 2.0cm, 3.5cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g, elástico de borracha e 3 guias de agulha.
Código 5416	Kit Prov Access Clear PullUp™ 1.5cm, 2.5cm, 3.5cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g, elástico de borracha e 3 guias de agulha.
Código 5417	Kit Prov Access Clear PullUp™ 0.5cm, 1.0cm, 1.5cm Conteúdo do kit: Cobertura para Transdutor de Ultrassom, Sachê de gel estéril 20g, elástico de borracha e 3 guias de agulha.
COMPOSIÇÃO	
Cobertura para Transdutor de Ultrassom PullUp - composto de Polietileno + tyvek Sachê de Gel estéril 20g - composto de Polímero, umectante, água purificada, metilparabeno e propilparabeno Elástico de borracha - composto de Poliisopreno, sem látex A guia de agulha é composta de Polietileno e Policarbonato	

Embalagem com 1Kit e caixa com 24 kits.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
O gel estéril é colocado dentro da cobertura para transdutor de ultrassom e serve como meio de contato para transmissão ultra-sônica. A cobertura para transdutor serve para cobrir o transdutor e sua extensão. Os elásticos de borracha são colocados para prender a cobertura e evitar a contaminação durante o procedimento. As guias de agulhas são adaptadas para agulhas de calibre 18-21Ga direcionam a agulha de forma que esta atravesse a pele e acesse o vaso a uma profundidade pré-determinada.

MODO DE USO
1. Retire os componentes do Kit Prov Access Clear PullUp™ da embalagem utilizando técnicas assépticas.
2. Pegue a cobertura para o transdutor e aperte as laterais para abrir a proteção.
3. Espalhe gel dentro da cobertura.
4. Coloque o transdutor de ultrassom dentro da cobertura e ajuste para não ficar rugas ou bolhas de ar.
5. Puxe a cobertura do transdutor por toda extensão.
6. Utilize os elásticos de borracha para prender a base do transdutor.
7. Use gel estéril entre o protetor e o paciente.
8. Selecione o guia de agulha para alcançar a profundidade desejada.
9. Encaixe a guia da agulha na abraçadeira ou diretamente no transdutor. Certifique-se que a guia esteja bem fixa e alinhada.
10. Insira a agulha com comprimento adequado na guia de forma que atinja a profundidade desejada.
11. Após a finalização, retirar a agulha da guia.

PRAZO DE VALIDADE
3 anos

ESTÉRIL – Esterilizado por Óxido de Etileno

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C). Mantenha o produto longe de alta temperatura, luz solar direta e gás corrosivo durante o transporte.
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.
Manter a embalagem unitária intacta.

ADVERTÊNCIAS
Não contém látex.
Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada.

Fabricante recomenda Uso Único.
O reprocessamento ou reutilização, pode criar risco de contaminação cruzada, paciente infeccionado e/ou mau funcionamento do produto.
O gel estéril não contém álcool.

FABRICANTE:
Aspen Surgical Products Inc
6945 Southbelt Drive SE, Caledonia, Michigan 49316, EUA
Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 Piraporinha – Diadema-SP - CEP:09.950-300
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210095

Site:www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 01/2025