



TERMÔMETRO DESCARTÁVEL  
T° PATCH ADESIVO TÉRMICO CORPORAL

A Medcorp, informa que a instrução de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:  
TP-08 e TP32

**INSTRUÇÕES DE USO**

**INDICAÇÃO:**

O T° Patch Adesivo Térmico corporal serve para verificar de forma imediata e constante a temperatura corporal devido a cor monocromática. É aplicada na pele e é resistente à água, desta forma pode ser utilizado por até quatro dias para adultos e até dois dias para crianças. Para uma indicação precisa da temperatura corporal recomendamos a colocação no pescoço, tórax, axilas ou testa. Quando o dispositivo é colocado em zonas periféricas do corpo (pernas, braços), é utilizado para ter uma indicação imediata e constante da temperatura da pele.

**DESCRIÇÃO**

T° Patch é um indicador de temperatura térmocrômico adesivo. A cor do T° Patch varia com a temperatura corporal com uma precisão de  $\pm 0,2$  °C.

Código de cor:



BAIXA

NORMAL

ALTA

Figura 1 Código de cor

	Cor	Temperatura
Baixa	Marrom	T < 34 °C
Normal	Verde	34 °C < T < 37 °C
Alta	Amarelo	T > 37,5 °C

**ESPECIFICAÇÕES**

Modelo: TP-08 - Cartela com 8 Adesivos térmicos descartável Indicador da temperatura corporal termocrômico

Modelo: TP32 - Cartela com 32 Adesivos térmicos descartável Indicador da temperatura corporal termocrômico

<b>Diâmetro</b>	1,8cm
<b>Espessura</b>	0,05cm

Apresenta na sua composição:

Camada de tinta termocrômica Castanha - composta de PVC livre de látex e tinta termocrômica

Camada de tinta termocrômica Verde - composta de PVC livre de látex e tinta termocrômica

Camada de tinta termocrômica amarela - composta de PVC livre de látex e tinta termocrômica

Camada de base branca - composta de PVC livre de látex

Camada adesiva - composta de PVC livre de látex com fita adesiva

**MECANISMO DE AÇÃO:**

É um dispositivo sensível ao calor, em contato com a pele pode ocorrer alteração na coloração dependendo da temperatura corporal do paciente.

Em baixas temperaturas (33,5°C a 34,5°C) a coloração ficará castanho, temperaturas entre 35° C a 37°C o dispositivo ficará com a coloração verde e a partir de 37,5°C a coloração ficará amarela.

A cor do T° Patch varia com a temperatura corporal com uma precisão de  $\pm 0,2$  °C.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Efetuar a limpeza na região que o dispositivo será colado.

**Cuidado:** não colocar em áreas que tenha cabelo ou pêlos excessivos.

2. Abrir a embalagem.

3. Remover um T°Patches adesivo térmico corporal e aplicá-la a uma das áreas recomendadas abaixo:

Estudos científicos mostram que a temperatura do corpo humano não é constante em todos os pontos do corpo, mas varia de acordo com o fornecimento de sangue a essa área específica do corpo.

37°C - próximo a região da testa

36°C - região peitoral

32°C - região do braço e antebraço

28°C - região do antebraço

34°C - região da coxa

30°C - região da panturrilha

Com base nestes estudos (ver bibliografia) as áreas recomendadas para a aplicação do T° Patch são os seguintes:

- Pescoço
- Atrás da orelha
- Peito
- Testa

4. Verificar a cor do T°Patch. A cor do T° Patch varia com a temperatura corporal com uma precisão de  $\pm 0,2$  °C. O T° Patch será castanho com uma temperatura corporal até 34 °C, verde com uma temperatura entre 34 °C e 37 °C, e amarelo vivo com uma temperatura superior a 37,5 °C.

**Atenção:** utilizar um termômetro padrão para medir a temperatura quando a coloração estiver amarela.

5. Retirar o T°Patch após o quarto dia para os adultos e após dois dias para as crianças.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Aplicar após uma limpeza completa da pele.

Não aplicar em áreas cobertas com cabelo ou pêlos excessivos.

Não ingerir.

Manter fora do alcance de crianças com menos de 36 meses.

Não utilizar após a data de vencimento.

Utilizar um termômetro padrão para medir a temperatura quando a coloração estiver amarela.

Produto não estéril.

Fabricante recomenda uso único.

**CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO**

Aplicar após uma limpeza completa da pele com água e sabão neutro.

Após o uso, descarte no lixo comum.

**PRAZO DE VALIDADE**

Prazo de Validade é de 5 anos a partir da sua fabricação.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura entre 14° C a 32° C

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 70%

Não expor o produto a luz solar direta.

Não expor a água e umidade.

**Fabricante:**

**GAMASTECH SRL**

Via Giovanni Verga, 27 - 95030 S. AGATA Battiati LI - Catania

**Detentor do Registro:**

Medcorp Hospitalar Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5

09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 3849-8992

Resp. Téc. Priscila Yokota - CRF/SP - nº 31.857

Registro ANVISA nº 10312210096

[www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

Atendimento ao cliente: 11-4067-5011; 11-3849-8992

Rev. 01 - 2024