

**ADAPTADORES  
ADAPTADORES CLAVE**

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

CH3034

**INSTRUÇÕES DE USO**


**INDICAÇÃO:**

Os Adaptadores Clave são adaptadores livres de agulhas indicados para uso como acessório em bolsas de fluidos e linhas de extensão IV.

**DESCRIÇÃO:**

É um adaptador livre de agulha com conector Spiros, descartável e estéril.

**ESPECIFICAÇÃO:**

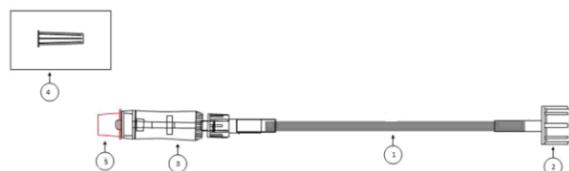

Comprimento total: 13 cm  
Capacidade: 1,50 MI

1 - Tubagem Composição: PVC sem DEHP
2 - Tampa terminal Composição: Polietileno
3 - Conector Spiros Composição: Policarbonato e silicone
4 - Tampa protetora Composição: Polipropileno
5 - Tampa protetora vermelho para Spiros Composição: Polietileno

**MECANISMO DE AÇÃO:**

Os Adaptadores Clave criam um sistema fechado, sem agulha, eliminando o risco de exposição às drogas perigosas durante a utilização.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1 - Utilizando técnica asséptica, abrir a embalagem na extremidade designada e remover o Adaptador Clave;
- 2 - Conectar o Adaptador Clave retirando a tampa removível da tubagem e introduzir o perfurador do conjunto de administração IV.
- 3 - Empurrar e rodar até ficar fixo.
- 4 - Para adaptar o Spiros ao dispositivo de acesso à bolsa de fluidos Clave contendo solução: feche o clamp do conjunto de administração IV, limpar o Clave no conjunto de administração IV e adaptar o Spiros ao Clave, empurrando e torcendo até fixar. Depois de conectado, o trajeto do líquido do Spiros se abre.
- 5 - Proceder o prime do conjunto liberando o(s) grampo(s) do conjunto de administração IV.
- 6 - Depois de fixado, fechar o grampo ou conjunto de administração.
- 7 - Prender o conjunto IV ao dispositivo de acesso vascular pretendido para perfusão.

8 - Para terminar a perfusão, remover o Spiros do dispositivo de acesso da bolsa de fluidos Clave. Depois de removido, o trajeto do líquido do Spiros se fecha automaticamente. Para o transporte, pode ser utilizada a tampa protetora do conector Spiros vermelha, não utilizar a tampa removível para o transporte.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Destruir após o uso.

Não utilizar agulhas.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Contém Policarbonato.

Não contém látex e nem DEHP.

**PROIBIDO REPROCESSAR.**



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

**PRAZO DE VALIDADE**

5 anos a partir da data de esterilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**FABRICANTE:**

ICU Medical, Inc.  
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**  
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74  
TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210033

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceticocoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 05/2025

Rev. 05- 2025