



CONECTOR COM LUER

CONECTOR CLAVE COM ADAPTADOR GRADUADO

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

CH3900

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:

O Conector Clave com Adaptador Graduado é indicado como um acessório para um cateter urinário que facilita a transferência de fluidos para dentro ou para fora da bexiga através da conexão ao adaptador graduado.

DESCRIÇÃO

É um conector sem agulha que mantém o sistema fechado com adaptador graduado, descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

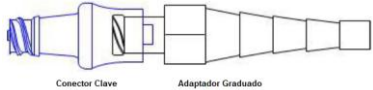

Conector Clave Composição: Poliéster, acrílico e silicone. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as seringas
Adpatador Graduado Composição: Policarbonato Finalidade: Apresenta diversos diâmetros em sua extensão para se conectar a diversos tamanhos de cateter.

Conector Clave com Adaptador Graduado
Comprimento total: 17,9cm
Capacidade: 0,909ml

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Conector Clave com adaptador Graduado é usado para infundir fluidos na bexiga. O adaptador graduado apresenta diversos diâmetros em sua extensão para se conectar a diversos tamanhos de cateter. O conector Clave pode se conectar a um dispositivo roscado ou a qualquer dispositivo Luer compatível com ISO 594-1 e -2. Quando o Clave está ativado/ conectado, o fluido pode passar pelo adaptador graduado. Quando a seringa ou o luer são desconectados do conector Clave, o mesmo pode suportar as pressões de até 45 psi e, assim, impedir que as vazões de fluido provenham da bexiga através do cateter e da fixação.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Introduza o Cateter Urinário no paciente e drene a bexiga de acordo com o protocolo da instituição.
- 2 - Remova o Conector Clave com adaptador graduado da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 3 - Insira a extremidade graduada do conector clave ao cateter urinário, empurre e conecte no cateter até ficar fixo.
- 4 - Aspire a medicação utilizando seringa.
- 5 - Realizar a assepsia do luer fêmea do conector Clave com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionando por 15 segundos.
- 6 - Conectar a seringa preenchida ao conector Clave, empurrando e rode até fixar. Não utilize força excessiva para não danificar o conector. Atenção: aperte todas as conexões antes de usar.
- 7 - Complete a terapêutica de medicação de acordo com o protocolo da instituição.
- 8 - Remova o Conector Clave com Adaptador graduado do Cateter, segure o adaptador graduado e gire até soltar.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

O Fabricante Recomenda Uso Único.

Não utilizar agulhas e tampa no Conector Clave.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

O conector Clave é compatível com luers com um diâmetro interno (ID) entre 1,55 mm e 2,8 mm.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210070

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025