



CONECTORES E CONEXÕES

CONECTOR CLAVE COM DISPOSITIVO DE ACESSO COM FILTRO

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

CH-51; CH-70; 011-CH-80S

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

Conector CLAVE com Dispositivo de Acesso com filtro é indicado para transferência de soluções de frascos e bolsas de soluções.

DESCRIÇÃO

É um conector sem agulha que mantém o sistema fechado com dispositivo de acesso e fitro.

ESPECIFICAÇÃO:

- CH-51 Conector Clave com dispositivo de acesso com filtro, ponta spike para frasco universal e asa lateral
Volume de priming = 0.16 ml;
Comprimento Total do Produto = 5,08 cm.
- CH-70 Conector Clave com dispositivo de acesso com filtro, ponta spike para frasco universal e asa lateral
Volume de priming = 0.064 ml;
Comprimento Total do Produto = 9,66 cm.
- 011-CH-80S Conector Clave com dispositivo de acesso com filtro, ponta spike para frasco universal e asa lateral
Volume de priming = 0,14ml;
Comprimento Total do Produto = 5,83 cm

Conector Clave Composição: Poliéster, acrílico e silicone.. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as seringas
Dispositivos de Acesso Composição: Policarbonato e polietileno Finalidade: serve para conectar ao frasco ou bolsa de medicamento
Filtro Composição: Filtro de Membrana, silicone e policarbonato. Finalidade: Não permitir a passagem de partículas e ar.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

É um sistema microbiologicamente e mecanicamente fechado, sem agulha, para manuseio seguro de medicamentos de risco.

INSTRUÇÕES DE USO:

1 - Retire o Conector CLAVE com Dispositivo de Acesso com filtro da embalagem utilizando técnica asséptica e a tampa do spike;
2 - Centralize o spike na borracha do frasco e empurre até o spike atravessar a borracha e fixar. Para produtos com recursos de travamento, certifique-se de que esses recursos estejam totalmente travados no anel de fechamento do frasco;
3 - Para infundir o diluente no frasco, coloque o frasco na posição vertical no balcão. Conecte a seringa com o diluente ao Conector Clave, empurrando e girando até estar apertada. Proceda a perfusão do diluente para dentro do frasco e agite de acordo com as instruções do fabricante. Não infundir diluentes ou ar no frasco quando invertido, pois isso bloqueará o filtro e impedirá a ventilação.
4 - Para retirar o líquido do frasco, limpe o Conector Clave de acordo com o protocolo da instituição.
5 - Conecte a seringa ao Conector Clave, empurrando e girando até ficar fixa. Inverta o frasco e aspire a quantidade de liquido pretendida.
Se estiver usando o conector spiros, o frasco pode ser pendurado para administração.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O Fabricante recomenda uso único.
Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado. Não contém Latex. Não contém DEHP. Não é compatível com N.N-Dimetilacetamina; Busulfan
O conector Clave permite o acesso de várias doses. Não retire do perfurador de dentro do frasco quando eliminar o frasco.

Contém Policarbonato.
O conector Clave é compatível com luers com um diâmetro interior entre 1,55mm e 2,8mm.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210089

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 02/2025