



CONECTORES E CONEXÕES

CONECTOR CLAVE COM DISPOSITIVO DE ACESSO

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

011-CA-300; 011-CS-10; 011-CS-50; 011-CU-9124; CH-12; CH-13; CH-51; CH-70; 011-CH-80S

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

Conector CLAVE com Dispositivo de Acesso é indicado para transferência de soluções de frascos e bolsas de soluções.

DESCRIÇÃO

É um conector sem agulha que mantém o sistema fechado com dispositivo de acesso.

ESPECIFICAÇÃO:

011-CA-300 Conector Clave com dispositivo de acesso, com cânula romba.
011-CS-10 Conector Clave com dispositivo de acesso à bolsa de solução com spike.
011-CS-50 Conector Clave com dispositivo de acesso à frasco multidose.
011-CU-9124 Conector Clave com dispositivo de acesso, com cânula romba.
CH-12 Conector Clave com dispositivo de acesso spike para bolsa de solução.
CH-13 Conector Clave com dispositivo de acesso spike para bolsa de solução.
CH-51 Conector Clave com dispositivo de acesso spike para frasco universal.
CH-70 Conector Clave com dispositivo de acesso spike para frasco universal, com asas laterais.
011-CH-80S Conector Clave com dispositivo de acesso spike para frasco.

Conector Clave Composição: Poliéster, acrílico e silicone.. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as seringas
Dispositivos de Acesso Composição: Policarbonato e polietileno Finalidade: serve para conectar ao frasco ou bolsa de medicamento

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

É um sistema microbiologicamente e mecanicamente fechado, sem agulha, para manuseio seguro de medicamentos de risco.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Para acesso à frascos:

- 1 - Retire o Conector CLAVE com Dispositivo de Acesso da embalagem utilizando técnica asséptica;
- 2 - Centralize o spike na borracha do frasco e empurre até o spike atravessar a borracha e fixar;
- 3 - Para proceder à perfusão do diluente para dentro do frasco, coloque o frasco na vertical em cima da bancada. Prenda a seringa com o diluente ao Conector Clave, empurrando e girando até estar apertada. Proceda a perfusão do diluente para dentro do frasco e agite de acordo com as instruções do fabricante.
- 4 - Para retirar o líquido do frasco, limpe o Conector Clave de acordo com o protocolo da instituição.
- 5 - Prenda a seringa ao Conector Clave, empurrando e girando até ficar fixa. Inverta o frasco e aspire a quantidade de líquido pretendida.

- Para acesso à bolsas de solução:

- 1 - Retire o Conector CLAVE com Dispositivo de Acesso da embalagem utilizando técnica asséptica;
- 2 - Remover a tampa de proteção e centralizar o dispositivo de acesso sobre a porta de saída da bolsa.
- 3 - Apertar contra a bolsa até que a ponta rígida que penetra na porta esteja segura;
- 4 - Desinfete o Conector Clave de acordo com o protocolo da instituição;
- 5 - Prenda a seringa ao Conector Clave;
- 6 - Aspire a solução de acordo com o protocolo da instituição;
- 7 - Repita para administrações subsequentes.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

O Fabricante Recomenda Uso Único.

Não utilizar agulhas e tampa no Conector Clave.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR D NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210035

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025