



CONECTOR COM LUER  
CONECTOR CLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica aos modelos comerciais:

011-C1000, 011-C1000RR

## INSTRUÇÕES DE USO

### INDICAÇÃO:


O Conector CLAVE® é um conector indicado para uso como acessório em linhas de extensão IV.

### DESCRIÇÃO

É um conector sistema fechado livre de agulhas, estéril.

### ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
011-C1000	Conector CLAVE®
011-C1000RR	Conector CLAVE® com anel vermelho

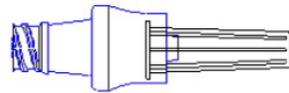

Conector  
Composição: Silicone, poliéster, polipropileno e acrílico  
Capacidade: 0,06 mL  
Comprimento total: 3,06cm

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso

### MECANISMO DE AÇÃO

O Conector CLAVE® é um sistema fechado, peça única, sem agulha. Trata-se de um dispositivo apirogênico, estéril, de uso único recomendado pelo fabricante, destinado a ser usado como complemento das linhas de extensão IV primárias e secundárias

### INSTRUÇÕES DE USO:

- 1-Remova o Conector Clave da embalagem com técnica asséptica.
- 2- Prime o Clave de acordo com o protocolo de instalação. Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 3- Retire a capa protetora do conector. Com técnica asséptica conecte o luer macho do Clave ao Cateter Intravenoso ou conjunto de extensão até que obtenha conexão segura.  
\* Recomenda-se lavagem rigorosa das mãos, uso de máscara e luvas estéreis.
- 4- Para acessar o Clave, realizar a assepsia do luer fêmea do conector com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionando por 15 segundos.
- 5- A seguir conecte totalmente a seringa ou conjunto de administração, segure o conector Clave, empurre firmemente e gire o conector macho em linha reta no sentido horário até que obtenha conexão segura.
- 6- Para desconectar segure o Clave e retire a seringa ou conjunto de extensão com movimento giratório no sentido anti-horário.
- Segure o Clave e não o hub do cateter, para prevenir desconexão acidental do Clave do cateter.
- 7- Realizar o Flush do Clave após cada uso com 20ml de Soro Fisiológico 0,9% para cada lúmen do cateter.
- 8- Para conexões subseqüentes repetir a partir do passo 4.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

**Fabricante recomenda o uso único.**

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.


Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não tampar o conector Clave, pois o dispositivo é um sistema fechado.

Não utilizar agulhas.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

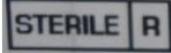

### PRAZO DE VALIDADE

6 anos a partir da data de esterilização.

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

### FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

### DETENTO DA NOTIFICAÇÃO:

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210031

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 03/2025