

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:


O Conector MicroClave é um conector sistema fechado, peça única, sem agulha, dispositivo apirogênico, estéril, indicado como acessório em linhas de extensão intravenosa.

DESCRIÇÃO

É um conector sistema fechado, sem agulha, estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-C3300	Comprimento total: 2,65 cm, capacidade total: 0,04 mL.
011-MC100	Comprimento total: 2,08 cm, capacidade total: 0,05 mL.

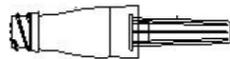

Conector MicroClave Composição: Acrílico, poliéster e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o conector durante o transporte antes de seu uso.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Conector MICROCLAVE® é um sistema fechado, peça única, sem agulha. Trata-se de um dispositivo apirogênico, estéril, de uso único recomendado pelo fabricante, destinado a ser usado como complemento das linhas de extensão IV primárias e secundárias.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1-Remova o Conector MicroClave da embalagem com técnica asséptica.
- 2- Prime o MicroClave de acordo com o protocolo de instalação. Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 3- Retire a capa protetora do conector. Com técnica asséptica conecte o luer macho do MicroClave ao Cateter Intravenoso ou conjunto de extensão até que obtenha conexão segura.
* Recomenda-se lavagem rigorosa das mãos, uso de máscara e luvas estéreis.
- 4- Para acessar o MicroClave, realizar a assepsia do luer fêmea do conector com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionando por 15 segundos.
- 5- A seguir conecte totalmente a seringa ou conjunto de administração, segure o conector MicroClave, empurre firmemente e gire o conector macho em linha reta no sentido horário até que obtenha conexão segura.
- 6- Para desconectar segure o MicroClave e retire a seringa ou conjunto de extensão com movimento giratório no sentido anti-horário.
Segure o MicroClave e não o hub do cateter, para prevenir desconexão acidental do MicroClave Clear do cateter.
- 7- Realizar o Flush do MicroClave após cada uso com Soro Fisiológico 0,9% para cada lúmen do cateter.
- 8- Para conexões subseqüentes repetir a partir do passo 4.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Fabricante recomenda o uso único.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector MicroClave, pois o conector é um sistema fechado.


Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

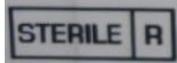

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210038

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025