



CONECTOR COM LUER

CONECTOR NEUTRON

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

011-NC100

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:

O Conector Neutron é um conector sistema fechado, peça única, sem agulha, dispositivo apirogênico, estéril, indicado como acessório em linhas de extensão intravenosa.

DESCRIÇÃO:

É um conector sistema fechado, sem agulha, descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

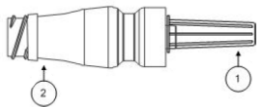

Comprimento total: 5,61 cm.

Capacidade: 0,059 ml.

1 - Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer macho enquanto o mesmo não é conectado.
2 - Conector Composição: Policarbonato + silicone. Finalidade: O corpo tem o luer macho que serve para conectar ao dispositivo de administração (seringa e em linhas de extensão IV), sendo ativado quando o luer fêmea é conectado a um dispositivo.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso.

MECANISMO DE AÇÃO:

O NEUTRON é conector luer sistema fechado, peça única, sem agulha. Trata-se de um dispositivo apirogênico, estéril, de uso único recomendado pelo fabricante, destinado a ser usado como complemento das linhas de extensão intravenosa primárias e secundárias.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1-Remova o NEUTRON da embalagem com técnica asséptica.
- 2- Prime o NEUTRON de acordo com o protocolo de instalação. Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 3- Retire a capa protetora do conector. Com técnica asséptica conecte o luer macho do NEUTRON ao Cateter Intravenoso ou conjunto de extensão intravenoso até que obtenha conexão segura.
* Recomenda-se lavagem rigorosa das mãos, uso de máscara e luvas estéreis.
- 4- Para acessar o NEUTRON, realizar a assepsia do luer fêmea do conector com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionando por 15 segundos.
- 5- A seguir conecte totalmente a seringa ou conjunto de administração, segure o NEUTRON, empurre firmemente e gire o conector macho em linha reta no sentido horário até que obtenha conexão segura.
- 6- Para desconectar segure o NEUTRON e retire a seringa ou conjunto de extensão com movimento giratório no sentido anti-horário.
Segure o NEUTRON e não o hub do cateter, para prevenir desconexão acidental do NEUTRON do cateter.
- 7- Realizar o Flush no NEUTRON após cada uso com Soro Fisiológico 0,9% para cada lúmen do cateter.
- 8- Para conexões subseqüentes repetir a partir do passo 4.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Fabricante recomenda o uso único.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector Neutron, pois o conector é um sistema fechado.

Conector Neutron é compatível com luers macho com diâmetro interno maior que 0.061".

Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74

TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312219005

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 05/2025