

Conector com Luer

CONECTOR SPIROS

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

CH2000; CH2000S

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:


O Conector Spiros® é um conector livre de agulhas indicado para uso como acessório em seringas e em linhas de extensão IV.

DESCRIÇÃO


É um conector sem agulha que mantém o sistema fechado, prevenindo vazamentos e derramamentos durante o transporte de medicamentos.

ESPECIFICAÇÃO:

CH2000

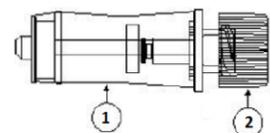

CH2000S

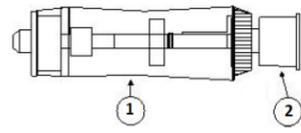

1 - Corpo Composição: Policarbonato + silicone. Finalidade: O corpo tem o luer macho que serve para conectar ao dispositivo de administração (seringa e em linhas de extensão IV), sendo ativado quando o luer fêmea é conectado a um dispositivo.
2 - Tampa Composição: Polietileno Finalidade: Serve para proteger o luer macho enquanto o mesmo não é conectado.

Código: CH2000
Comprimento: 2,6 cm
Capacidade: 0,06 mL

Código CH2000S
Comprimento: 3,6 cm
Capacidade: 0,1 mL

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Conector Spiros® é um sistema fechado, sem agulha que impede a fuga de líquidos ou entrada de ar durante a utilização. Possui selo de silicone onde está sempre na posição fechado até que seja ativado por conexão a qualquer dispositivo conector luer.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remover o Conector Spiros® na extremidade designada utilizando técnica asséptica.
- 2 - Segurar o Conector Spiros® e conectar ao luer macho padrão do dispositivo de administração.
- 3 - Para abrir o caminho do trajeto do líquido no Conector Spiros®, conectá-lo a um conector fêmea, inclusive conectores sem agulha. Desconectar quando terminar para fechar o Conector Spiros®. O luer do Conector Spiros® pode ser coberto com uma tampa não-ativadora para transporte, se desejado.
- 4 - Para proceder a infusão ou à aspiração através do Conector Spiros®, conectar a qualquer porta padrão livre de agulha. Segurar o corpo do Conector Spiros® e rodar na porta até ficar fixo.
- 5 - Retirar o Conector Spiros® segurando o corpo e rodar até se soltar da porta. O Conector Spiros® irá fechar automaticamente quando estiver desconectado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Fabricante Recomenda o Uso Único.

Não utilizar agulhas.


Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO**

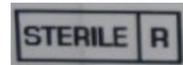

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210032

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025