

A Medcorp, informa que a instrução de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:
CH33

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:

O Duplo Conector MicroClave Clear é indicado para misturar drogas/ fármacos em seringas.

DESCRIÇÃO:

É um duplo conector sistema fechado, sem agulha, descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

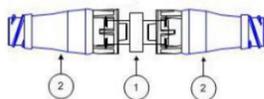

Comprimento: 5,08cm
Capacidade: 0,15ml

1 - Conector Composição: Policarbonato
2 – Conector MicorClave Clear Composição: Acrílico, poliéster e silicone

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO:

O Duplo Conector MicroClave Clear mistura os fármacos contidos nas seringas, após o êmbolo da segunda seringa preenchida for empurrada para injetar o fármaco contido na mesma para a primeira seringa.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remova o Duplo Conector MicroClave Clear da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 2 - Encha a primeira seringa com fármaco, de acordo com o protocolo da instituição.
- 3 - Realizar a assepsia do luer fêmea do conector MicroClave Clear com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionado por 15 segundos.
- 4 - Conecte a seringa preenchida no conector MicroClave Clear, empurre e e gire até fixar. Não usar força excessiva para não danificar o conector.
- 5 - Encha a segunda seringa com fármaco a ser misturado com o conteúdo da primeira seringa. Cuidado: não preencher as seringas em sua totalidade, devido a impossibilidade de misturas.
- 6 - Realizar a assepsia do outro luer fêmea do conector MicroClave Clear com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexedina 0,5%) ou swab friccionado por 15 segundos.
- 7 - Conecte a seringa preenchida no conector MicroClave Clear, empurre e gire até fixar. Não usar força excessiva para não danificar o conector.
- 8 - Para misturar, empurre o êmbolo da segunda seringa para injetar o fármaco contido na mesma para a primeira seringa.
- 9 - Quando os produtos estiverem misturados, retire a seringa contendo a mistura de fármacos. Administre o fármaco no paciente de acordo com o protocolo da instituição.
- 10 - Descarte o duplo conector MicroClave Clear, juntamente com as seringas vazias, de acordo com o protocolo da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Fabricante recomenda o uso único.

Não utilizar tampas e agulhas.

Conector Microcalve Clear é compatível com luers macho com diâmetro interno entre 1,55mm e 2,8mm.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.


Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

PROIBIDO REPROCESSAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

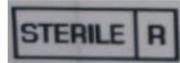

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210069

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025