

**EXTENSOR  
EXTENSOR COM TORNEIRINHA MICROCLAVE CLEAR**

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

011-MC330478; 011-MC330477

**INSTRUÇÕES DE USO**

**INDICAÇÃO:**


O Extensor com Torneirinha MicroClave®Clear é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação. Evita a inconveniente abertura e conexão de vários conjuntos ou montagem de múltiplos componentes IV para obter uma configuração desejada.

**DESCRIÇÃO**

É um extensor com torneirinha 3 vias, 1 conector microclave clear, 1 luer rotativo, 1 clamp, descartável, estéril.

**ESPECIFICAÇÃO:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
011-MC330477	Extensor 61cm com MicroClave® Clear, Torneirinha 3-vias, Luer rotativo, clamp e Tubo sem DEHP Capacidade: 3,4 ml.
011-MC330478	Extensor 119cm com MicroClave® Clear, Torneirinha 3-vias, Luer rotativo, clamp e Tubo sem DEHP Capacidade: 6,3 ml.

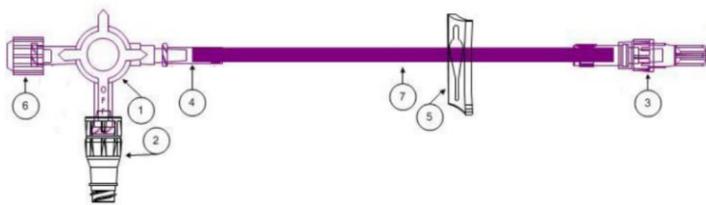

1 – Torneirinha 3 vias Composição: Acrílico, Policarbonato e Polietileno. Finalidade: serve para administrar drogas ou solução intravenosa contínuas ou intermitente.
2 - Conector MicroClave Clear Composição: Acrílico, Poliéster e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
3 - Luer Rotativo com tampa Composição: Policarbonato, PVC e Polietileno. Finalidade: Serve para conectar ao acesso do paciente.
4 – Adaptador Composição: PVC sem DEHP, Policarbonato e Polietileno. Finalidade: Serve para conectar a torneirinha.
5 – Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
6 – Capa protetora Composição: Polietileno. Finalidade: Serve para proteger o luer fêmea.
7 - Tubo extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos e aumentar a distância do equipo ou cateter.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

**MECANISMO DE AÇÃO**

O Extensor com Torneirinha MicroClave®Clear é um dispositivo que se conecta ao equipo e/ou cateter formando um sistema fechado e sem agulha.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Remova o Extensor com Torneirinha MicroClave® Clear da embalagem utilizando técnica asséptica.
2. Priming: realizar o priming no conector MicroClave® Clear, na torneirinha e na extensão.
  - Para lavagem do conector MicroClave® Clear e das extensões conecte o dispositivo de priming ao conector MicroClave® Clear e inverta o dispositivo para expelir o ar; na torneirinha gire as setas

direccionais na aba de giro para expelir o ar e também para o uso pretendido. Repita este passo para várias extensões, conforme necessário.

3. Utilização: desinfete o conector MicroClave® Clear e todas as entradas, utilizando o swab em movimento circular durante três segundos. Conecte o dispositivo de administração pressionado diretamente para dentro do conector e rode até encaixar.

4. Irrigue o conector MicroClave® Clear com uma solução salina ou de acordo com o protocolo da instituição.

5. Uma vez efetuado o priming, conecte ao cateter vascular do paciente.

6. Lave o conector MicroClave® Clear após cada utilização de acordo com o protocolo da instituição.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Não deixe expostas portas/hubs abertos. Substitua as tampas de proteção estéreis, conforme necessário.

Não reesterilizar e nem reutilizar.

Destruir após o uso.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém latex. Não contém DEHP.

Não use agulhas, cânulas rombas ou tampas de luer no conector.

Não tampar o conector MicroClave® Clear, pois o dispositivo é um sistema fechado

**PROIBIDO REPROCESSAR.**



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**



**PRAZO DE VALIDADE**

5 anos a partir da data de esterilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**FABRICANTE:**

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clemente - CA 92673 Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210068

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso , sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 03/2025