

EXTENSOR

**EXTENSOR DE EQUIPO SPIROS**

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

CH3033

**INSTRUÇÕES DE USO**


**INDICAÇÃO:**

O Extensor de Equipo SPIROS® é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação. Evita a inconveniente abertura e conexão de vários conjuntos ou montagem de múltiplos componentes Intravenoso para obter uma configuração desejada.

**DESCRIÇÃO**

É um extensor bifuso de 36cm com ponta spike, 1 conector Spiros e tampa ventilada.

**ESPECIFICAÇÃO:**

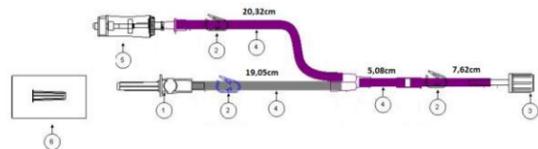

1 – Perfurador Composição: ABS e Polietileno Finalidade: serve para perfurar o recipiente da solução.
2 – Clamp Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
3 – Adaptador Composição: PVC sem DEHP, policarbonato e polietileno Finalidade: Serve para conectar no equipo ou extensão IV.
4 – Tubo Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos.
5 – Conector Spiros Composição: Policarbonato e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
6 – Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para tampar o Spiros, exceto durante o transporte.
7 – Tampa Terminal Composição: Polietileno Finalidade: Serve para tampar o conector Spiros durante o transporte.

Comprimento Total: 36 cm

Capacidade Total: 4,8 ml

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

**MECANISMO DE AÇÃO**

O Extensor de Equipo SPIROS® é um dispositivo que se conecta ao equipo e/ou cateter formando um sistema fechado e sem agulha.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1 - Remover o Extensor de Equipo Spiros da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 2 - Remover a tampa do adaptador e conectar no equipo.
- 3 - Empurrar e rodar até estar fixo.
- 4 - Preparar um recipiente de solução intravenoso de acordo com as instruções do fabricante.
- 5 - Fechar os clamps e conectar a tampa no Spiros.
- 6 - Retirar a tampa do perfurador e inserir no recipiente da solução.
- 7 - Abrir o clamp da extensão.
- 8 - Após a conclusão do preparo, fechar o clamp da extensão próximo ao adaptador.

9 - A extensão bifurcada que contém o Spiros irá se conectar desde que a tampa esteja fixa.

10 - Após a conexão retire a tampa do Spiros na extensão bifurcada e conecte ao conector do solução intravenosa. Depois de conectado, o trajeto do líquido se abre.

11 - Conectar a extensão ao dispositivo de acesso vascular pretendido para infusão.

12 - Depois de desconectado, o trajeto do líquido do Spiros fecha-se automaticamente. Para o transporte, pode ser utilizada uma tampa terminal fechada no Spiros, não utilizar a tampa de conexão para o transporte

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Não utilizar agulhas.

Destruir após o uso.

Contém POLICARBONATO.

Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

**PROIBIDO REPROCESSAR.**



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO**

**PRAZO DE VALIDADE**

5 anos a partir da data de esterilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**FABRICANTE:**

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74

TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210046

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025