

EXTENSOR EXTENSOR EQUIPO CLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

011- C4203-2, 011-CU-1362, 011-C4203-1

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

O Extensor de Equipo CLAVE é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação. Evita a inconveniente abertura e conexão de vários conjuntos ou montagem de múltiplos componentes IV para obter uma configuração desejada.

DESCRIÇÃO

É um extensor para equipo com conector Clave, clamp, luer rotativo, estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

| Código | Especificação |
|--------------------|--|
| 011-C4203-2 | Extensor de Equipo com dois CLAVE® sem DEHP, Clamp, Luer Rotativo, comprimento total: 22 cm, capacidade total: 1,09 mL. |
| 011-CU-1362 | Extensor de Equipo Trifurcado com três CLAVE® sem DEHP, três Clamps, Luer Rotativo, comprimento total: 15 cm, capacidade total: 1,58 mL. |
| 011-C4203-1 | Extensor de Equipo com CLAVE® sem DEHP, Clamp, Luer Rotativo, comprimento total: 16 cm, capacidade total: 0,75 mL. |

| |
|---|
| Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo. |
| Tubo macrobore extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos. |
| Conector Clave Composição: Acrílico, poliéster, polipropileno e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento. |
| Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer rotativo antes de seu uso. |
| Adaptador Composição: PVC sem DEHP, Policarbonato e Polietileno Finalidade: Serve para conectar o luer rotativo. |
| Conector Trifurcado Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para fixar os tubos extensores. |

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Extensor de Equipo CLAVE® é um dispositivo que se conecta ao equipo e/ou cateter formando um sistema fechado e sem agulha.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remover o Extensor de Equipo Clave da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 2 - Lavar o Extensor de Equipo Clave de acordo com o protocolo de instalação.
- 3 - Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 4 - Passar um swab no conector Clave e conectar o extensor de Equipo Clave no equipo e/ou cateter do paciente.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

Destruir após o uso.

Não utilizar agulhas e tampas no conector Clave.

O conector Clave é compatível com luers com um diâmetro interior entre 1,55mm e 2,8mm.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.


Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

PROIBIDO REPROCESSAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.

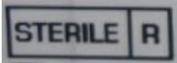

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74

TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210036

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 05/2025