



EXTENSOR
EXTENSOR EQUIPO MICROCLAVE CLEAR

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

011-MC2005-2-I; 011-MC3312; 011-MC3316; 011-MC3320; 011-MC3339; 011-MC3354; 011-MC1362-I; 011-C2005-2B.

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:
O Extensor de Equipo MICROCLAVE CLEAR® é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente.
Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação. Evita a inconveniente abertura e conexão de vários conjuntos ou montagem de múltiplos componentes IV para obter uma configuração desejada.

DESCRIÇÃO
É um extensor para equipo com conector MicroClave Clear, clamp, luer rotativo, estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-MC2005-2-I	Extensor de Equipo Bifuso 15cm com 2 MicroClave Clear, 2 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento: 15cm; Capacidade: 0,87ml
011-MC3312	Extensor de Equipo Bifuso 20cm com 2 MicroClave Clear, 2 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento: 20cm ; Capacidade total: 1,20ml
011-MC3316	Extensor de Equipo Bifuso 15cm com 2 MicroClave Clear, 3 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento total: 15cm; Capacidade total: 0,34 ml
011-MC3320	Extensor de Equipo Bifuso 28cm com 2 MicroClave Clear, 2 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento total: 28cm; Capacidade total: 0,58ml
011-MC3339	Extensor de Equipo Monofuso de 15cm com 1 MicroClave Clear 1 Clamp, Luer Rotativo Macho Comprimento total: 15cm; Capacidade total: 0,28ml
011-C33354	Extensor de Equipo Monofuso de 13cm com 1 MicroClave Clear, 1 Clamp, Luer Rotativo Macho Comprimento total: 13cm; Capacidade total: 0,20ml
011-MC1362-I	Extensor de Equipo Trifuso de 15cm com 3 MicroClave Clear, 3 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento Total 15cm ; Capacidade total 1,3ml
011-C2005-2B	Extensor de Equipo Bifuso de 71cm com 2 MicroClave Clear, 2 Clamps, Luer Rotativo Macho Comprimento total: 71cm ; Capacidade total: 3,1ml

Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
Tubo extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos.
Conector MicroClave Clear Composição: Acrílico, poliéster e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
Luer rotativo Composição: PVC sem DEHP, Policarbonato e Polietileno Finalidade: Serve para conectar ao acesso do paciente.
Conector Bifurcado ou Trifurcado Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para fixar os tubos extensores.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO
O Extendor de Equipo MICROCLAVE CLEAR® é um dispositivo que se conecta ao equipo e/ou cateter formando um sistema fechado e sem agulha.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Remover o Extensor de Equipo MicroClave Clear da embalagem utilizando técnica asséptica.
2 - Lavar o Extensor de Equipo MicroClave Clear de acordo com o protocolo de instalação.
3 - Inverter o dispositivo para expelir o ar.
4 - Passar um swab no conector MicroClave Clear e conectar o extensor de Equipo MicroClave Clear no equipo e/ou cateter do paciente.
5 - Depois de conectar o extensor de Equipo MicroClave Clear no equipo e/ou cateter do paciente, certifique-se que o luer esteja totalmente encaixado antes de fechar o anel.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Destruir após o uso.

Não utilizar agulhas e tampas no conector MicroClave Clear.

O conector MicroClave Clear é compatível com luers com um diâmetro interior entre 1,55mm e 2,8mm.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.


Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

PROIBIDO REPROCESSAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

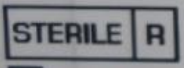

PRAZO DE VALIDADE
5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:
ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 – CEP: 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210064

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 05/2025