



EXTENSOR
EXTENSOR DE EQUIPO MICROCLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam a todos os modelos comerciais:

011-C3302, 011-C3322, 011-CT3306

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

O Extensor de Equipo MICROCLAVE® é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação. Evita a inconveniente abertura e conexão de vários conjuntos ou montagem de múltiplos componentes IV para obter uma configuração desejada.

DESCRIÇÃO

É um extensor para equipo de uma via com filtro de linha de 0,2micras e conector sistema fechado.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-C3302	Extensor de Equipo MICROCLAVE® Smallbore sem DEHP ,Clamp, Luer Rotativo, comprimento total: 18 cm, capacidade total: 0,247 mL.
011-C3322	Extensor de Equipo Bifuso com dois MICROCLAVE® Smallbore sem DEHP, dois Clamps, Luer Rotativo, comprimento total:13cm, capacidade total: 0,329 mL.
011-CT3306	Extensor de Equipo MICROCLAVE® Smallbore sem DEHP,Clamp, Luer Rotativo, comprimento total: 13 cm, capacidade total: 0,22 mL.

Tubo Minibore Composição: PVC sem DEHP Finalidade: serve para transferir os líquidos.
Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
Tubo extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos.
Conector MicroClave Composição: Acrílico, poliéster e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer rotativo antes de seu uso.
Adaptador Composição: PVC sem DEHP, Policarbonato e Polietileno Finalidade: Serve para conectar o luer rotativo.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Extendor de Equipo MICROCLAVE® é um dispositivo que se conecta ao equipo e/ou cateter formando um sistema fechado e sem agulha.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remover o Extensor de Equipo MicroClave da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 2 - Lavar o Extensor de Equipo MicroClave de acordo com o protocolo de instalação.
- 3 - Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 4 - Passar um swab no conector MicroClave e conectar o extensor de Equipo MicroClave no equipo e/ou cateter do paciente.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.


Destruir após o uso.
Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.
Não contém Latex. Não contém DEHP.
Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar.
Não utilizar agulhas e tampas no conector MicroClave.
O conector MicroClave é compatível com luers de diâmetros internos entre 1,5 mm a 2,8 mm.

Não reesterilizar e nem reutilizar.

PROIBIDO REPROCESSAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.

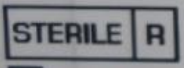

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 – CEP: 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210043

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 05/2025