



EXTENSOR

EXTENSOR DE EQUIPO NANOCLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

011-A1001; 011-A1002; 011-A1003; 011-A1004; 011-A1007; 011-A1008; 011-A1009 e 011-A1013

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:
O Extensor de Equipo NanoClave® é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação, aumenta a distância do equipo ou cateter até o paciente e auxilia na troca do equipo sem manipulação local.

DESCRIÇÃO
É um extensor para equipo com NanoClave conector e luer, descartável, uso único.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-A1001	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 15,00cm e volume de priming 0,26ml
011-A1002	Extensor de Equipo 1 via, luer slip Comprimento total: 15,00cm e volume de priming 0,26ml
011-A1003	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 15,00cm e volume de primng 0,24mL;
011-A1004	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 12,7cm e volume de priming 0,24mL;
011-A1007	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 17,78cm e volume de priming 0,29mL;
011-A1008	Extensor de Equipo 1 via, luer lock Comprimento total: 17,78cm e volume de priming 0,26mL;
011-A1009	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 17,78cm e volume de priming 0,32mL;
011-A1013	Extensor de Equipo 1 via, luer rotativo Comprimento total: 25,4cm e volume de priming 2,90mL.

Conector Nanoclave Composição: Policarbonato e silicone. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as linhas intravenosas.
Conector MicroClave Clear Composição: Acrílico, poliéster e silicone Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.
Tubo Extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: serve para aumentar a distância e por onde a medicamento ou líquido passa.
Tampa luer fêmea Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer fêmea enquanto o mesmo não é conectado.
Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
Adaptador Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para conectar o luer.

Acondicionado individualmente em embalagem blister em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades.

MECANISMO DE AÇÃO
O Extensor de Equipo NanoClave® é um dispositivo que se conecta ao equipo ou cateter do paciente, permite uma adaptação segura e forma um sistema fechado e sem agulha.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Remover o dispositivo do embalagem utilizando técnica asséptica.
Se aplicável, apertar todas as ligações.
2 - Conectar o dispositivo de acordo com o protocolo da instituição.
3 - Quando aplicável, abrir os clampes e proceder à infusão para expelir o ar. Repetir para extensões ou dispositivos múltiplos.
4 - Para conectar o conector NanoClave ou MicroClave: inverter e bater para expelir o ar. Prender o dispositivo de administração no conector empurrando e rodando até fixar. Irrigar o conector com solução salina normal ou de acordo com o protocolo da instituição.
5 - Depois de conectado prender o extensor ao dispositivo de acesso vascular desejado.


ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
- Destruir após o uso.
- Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.
- Não contém Latex. Não contém DEHP.
- Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.
- Não utilizar agulhas e tampas nos conectores NanoClave e MicroClave.
- Contém POLICARBONATO.
- Os conectores MicroClave e NanoClave são compatíveis com luers de diâmetro interno (ID) entre 1,55 mm e 2,8 mm.

- NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

- PROIBIDO REPROCESSAR



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

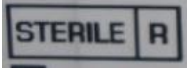

PRAZO DE VALIDADE
5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:
ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210047

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025