

**EXTENSOR  
EXTENSOR MULTIVIA**

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

011-C32036; 011-H2506

**INSTRUÇÕES DE USO**

**INDICAÇÃO:**


O Extensor Multivia é indicado para conexão em equipos e cateter do paciente. Fornece soluções econômicas para atender as necessidades de instalação, aumenta a distância do equipo ou cateter até o paciente e auxilia na troca do equipo sem manipulação local.

**DESCRIÇÃO**

É um extensor Bifuso com 2 Clamps, Luer rotativo, estéril de uso único.

**ESPECIFICAÇÃO:**

Código	Descrição
011-C32036	Extensor Bifuso com 2 Clamps, Luer Rotativo Comprimento: 18cm; Capacidade: 1,2ml
011-H2506	Extensor Bifuso Smallbore com 2 Clamps, Luer Rotativo Comprimento: 13cm; Capacidade: 0,37ml

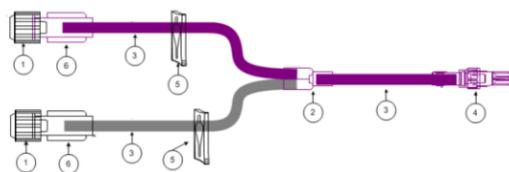

1 - Tampa Composição: Polietileno Finalidade: Serve para tampa o luer fêmea.
2 – Conector Bifurcado Composição: PVC sem DEHP Finalidade: serve para conectar os tubos extensores.
3 - Tubo extensor Composição: PVC sem DEHP Finalidade: Serve para transferir os líquidos e aumentar a distância do equipo ou cateter.
4 - Luer Rotativo com tampa Composição: Policarbonato, PVC e Polietileno Finalidade: Serve para conectar ao acesso do paciente.
5 - Clamp Composição: Polietileno Finalidade: Serve para abrir ou fechar o fluxo de líquido pelo tubo.
6 - Adaptador Composição: Policarbonato, Polietileno e PVC Finalidade: Serve para conectar o luer fêmea.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

**MECANISMO DE AÇÃO**

O Extensor Multivia é um dispositivo que se conecta ao equipo ou cateter do paciente, permite uma adaptação segura e forma um sistema fechado e sem agulha.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1 - Remover o Extensor Multivia da embalagem utilizando técnica asséptica.
- 2 - Retirar a tampa protetora do adaptador e efetuar o prime do Extensor Multivia de acordo com o protocolo de instalação.
- 3 - Fechar o Clamp.
- 4 - Retirar a tampa protetora do luer macho.
- 5 - Quando aplicável, abrir o clamp e proceder a infusão para expelir o ar.
- 6 - Conectar o Extensor Multivia no dispositivo de acesso vascular.
- 7 - Empurre e gire até estar totalmente fixo. Não utilize força excessiva, pois pode danificar o produto.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Descartar após o uso.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.


Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

**PROIBIDO REPROCESSAR.**



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

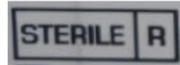

**PRAZO DE VALIDADE**

5 anos a partir da data de esterilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**FABRICANTE:**

ICU Medical, Inc.  
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**  
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74  
TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210067

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025