



PROTETORES
SWAB CAP

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:
Caixa com 200 unidades de SwabCap®, Pacote com 10 unidades de SwabCap®, Pacote com 25 unidades de SwabCap®

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:
SwabCap é uma tampa indicada para uso em conector livre de agulha capazes de proteger de uma potencial contaminação e desinfectar os conectores livres de agulha. O SwabCap atua como uma barreira física à contaminação entre a linha de acessos e também serve para desinfectar a linha de acesso antes de seu uso.

SwabCap é uma tampa, peça única, estéril, que se conecta de forma segura ao conector luer livre de agulha, contendo uma esponja com álcool isopropílico 70% que irá desinfectar o conector livre de agulha após 5 (cinco) minutos da aplicação e manter a superfície desinfetada por até sete (7) dias se não forem removidos.

DESCRIÇÃO
É uma tampa, peça única, estéril, contendo uma esponja com álcool isopropílico 70%.

ESPECIFICAÇÃO:

Descrição
SwabCap® caixa com 200 unidades
SwabCap® pacote com 10 unidades
SwabCap® pacote com 25 unidades

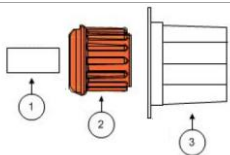

1 - Esponja Composição: Espuma – FOAM com 70% Álcool Isopropílico USP Finalidade: Serve para desinfectar o conector livre de agulha.
2 – Swab Composição: TPV – Santoprene TPV Grade Finalidade: serve para acondicionar a espuma.
3 - Embalagem Composição: HDPE - Alathon M 6580 Finalidade: Serve para acondicionar o swab cap.

O produto é disponibilizado em embalagem primária transparente composto de Alathon M6580 e uma película de proteção laminada (Rollprint).

Embalagem secundária Pacote contendo:
10 e 25 unidades de SwabCap®
Embalagem secundária Caixa de Papelão, contendo:
200 unidades de SwabCap®.

MECANISMO DE AÇÃO
SwabCap é uma tampa, peça única, estéril, que se conecta de forma segura ao conector luer livre de agulha, contendo uma esponja com álcool isopropílico 70% que irá desinfectar o conector livre de agulha após 5 (cinco) minutos da aplicação e manter a superfície desinfetada por até sete (7) dias se não forem removidos.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Verifique a integridade da embalagem do produto antes da abertura. Não utilize se a mesma estiver danificada.
- 2 - Retire a película de proteção laminada do SwabCap® utilizando técnica asséptica;
- 3 - Não remova o SwabCap® da embalagem;
- 4 - Segure o conector sistema fechado e insira o SwabCap®. Após inserção, girar o SwabCap® sentido horário;
- 5 - Retire a embalagem plástica do SwabCap®;
- 6 - Aguarde 5 minutos para que seja efetuada a desinfecção.

- 7 - Para remover o SwabCap® é necessário segurar o conector sistema fechado para não ser removido involuntariamente, girar o SwabCap® sentido anti horário e retirar;
- 8 - Descartar o SwabCap® após a retirada;
- 9 - Verifique se o conector sistema fechado está conectado de forma correta ao cateter;
- 10 - O conector sistema fechado está pronto para ser utilizado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

O Fabricante recomenda o uso único.

Manter longe de fogo/ Chamas.

Não utilize se o álcool estiver seco.


Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.**

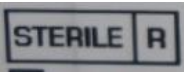

PRAZO DE VALIDADE

2 Anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210063

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025