



A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:
011-CAP1, CH-CAP, CH-CAP5, CH-CAP10

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:
A Tampa Estéril é indicada para fechar a via de acesso do conector sistema fechado Spiros e em extensões de equipo, protegendo a entrada de microorganismo durante o período que não estiver recebendo infusão de soro ou drogas.

DESCRIÇÃO
É um uma tampa estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

Código Produto	Descrição
011-CAP1	1 Tampa Estéril Azul Comprimento total: 1,8 cm
CH-CAP	1 Tampa Estéril Vermelho Comprimento total: 1,7 cm
CH-CAP5	5 Tampas Estéreis Vermelho Comprimento total: 1,7 cm
CH-CAP10	10 Tampas Estéreis Vermelhas Comprimento total: 1,7 cm

Tampa Composição: Polietileno Finalidade: Serve para fechar a via de acesso do conector Spiros e em extensões de equipo

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO
A Tampa Estéril é uma tampa seladora luer, de uso único, recomendado pelo fabricante, destinado a proteger da entrada de microorganismos durante o transporte ou não utilização do conector Spiros ou extensões de equipo.

INSTRUÇÕES DE USO:
1 - Remova a Tampa Estéril da embalagem com técnica asséptica.
2 - Encaixe a tampa no conector Spiros ou na extensão do equipo.
3 - Verifique se está totalmente conectado.
4 - Após o uso descartar a tampa.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.


Fabricante Recomenda Uso Único.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

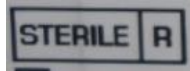

PRAZO DE VALIDADE
5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:
ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:
Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210034

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025