

TORNEIRAS

TORNEIRINHA COM MICROCLAVE CLEAR

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

011-MC33538; 011-MC330021

**INSTRUÇÕES DE USO**

**INDICAÇÃO:**


A torneirinha com MicroClave® Clear é indicada para conexão em cateter e em linhas de extensões IV.

**DESCRIÇÃO**

É uma torneirinha de 3 vias com luer rotativo e conector microclave clear sem agulha que mantém o sistema fechado, prevenindo vazamentos e derramamentos durante o transporte de medicamentos.

**ESPECIFICAÇÃO:**

Código Produto	Especificação
011-MC33538	Torneirinha 3 vias com luer rotativo e 1 conector microclave clear. Comprimento: 5,08cm e Capacidade: 0,36ml
011-MC330021	Torneirinha 3 vias com luer rotativo e 2 conectores microclave clear. Comprimento: 8,89cm e Capacidade: 0,4ml

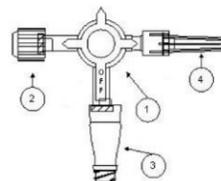

1 - Torneirinha Composição: Polipropileno, policarbonato e acrílico. Finalidade: serve para administrar drogas ou solução intravenosa contínuas ou intermitente.
2 - Tampa Composição: Polietileno Finalidade: Serve para proteger o luer macho enquanto o mesmo não é conectado.
3 – Conector Microclave Clear Composição: corpo do conector – silicone e policarbonato + tampa de polipropileno. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as linhas intravenosas.
4 - Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer fêmea enquanto o mesmo não é conectado.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades.

**MECANISMO DE AÇÃO**

A torneirinha com MicroClave® Clear é um dispositivo que se conecta ao cateter e em linhas de extensões IV formando um sistema fechado e sem agulha. Uso único e estéril.

**INSTRUÇÕES DE USO:**

- 1 - Remova a torneirinha com MicroClave® Clear da embalagem com técnica asséptica.
- 2 - Lavar a torneirinha, soltando a tampa da porta lateral e girar a alça para expelir o ar. Para administrar ou aspirar através da torneirinha, utilizar as setas direcionais na aba de giro para o uso pretendido.
- Lavar o MicroClave® Clear e inverter o dispositivo para expelir o ar.
- Lavar o conjunto e conectar ao cateter do paciente.
- Para ter acesso, limpar o MicroClave® Clear com swab e então pressionar e girar o dispositivo de administração para dentro do MicroClave® Clear até que esteja preso. Lavar o MicroClave® Clear após cada utilização de acordo com o protocolo da instituição.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

O conector MicroClave® Clear contém POLICARBONATO.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector MicroClave® Clear, pois o dispositivo é um sistema fechado.

O conector MicroClave® Clear é compatível com luers de diâmetro interno (ID) entre 1,55 mm e 2,8 mm.

Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.


NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

**PROIBIDO REPROCESSAR**



Destruir após o uso.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

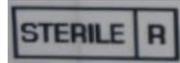

**PRAZO DE VALIDADE**

5 anos a partir da data de esterilização.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

**FABRICANTE:**

ICU Medical, Inc.  
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

**DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:**

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**  
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74  
TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210051

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

**Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025