

TORNEIRAS

TORNEIRINHA 3 VIAS COM MICROCLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam ao modelo comercial:

011-C3352

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:

A torneirinha com MicroClave® é indicada para conexão em cateter e em linhas de extensões IV.

DESCRIÇÃO

É uma torneirinha de 3 vias com um conector microclave sem agulha que mantém o sistema fechado, prevenindo vazamentos e derramamentos durante o transporte de medicamentos.

ESPECIFICAÇÃO:

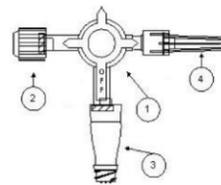

1 - Torneirinha Composição: Polipropileno, policarbonato e acrílico. Finalidade: serve para administrar drogas ou solução intravenosa contínuas ou intermitente.
2 - Tampa Composição: Polietileno Finalidade: Serve para proteger o luer macho enquanto o mesmo não é conectado.
3 – Conector Microclave Composição: corpo do conector - silicone, poliéster e acrílico + tampa de polipropileno. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as linhas intravenosas.
4 - Tampa Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer fêmea enquanto o mesmo não é conectado.

Comprimento Total: 5,08cm

Capacidade: 0,42ml

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades.

MECANISMO DE AÇÃO

A torneirinha com MicroClave é um dispositivo que se conecta ao cateter e em linhas de extensões IV formando um sistema fechado e sem agulha. Uso único e estéril.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remova a torneirinha 3 vias com MicroClave® da embalagem com técnica asséptica.
 - 2 - Lavar a torneirinha, soltando a tampa da porta lateral e girar a alça para expelir o ar. Para administrar ou aspirar através da torneirinha, utilizar as setas direcionais na aba de giro para o uso pretendido.
- Lavar o MicroClave® e inverter o dispositivo para expelir o ar.
 - Lavar o conjunto e conectar ao cateter do paciente.
 - Para ter acesso, limpar o MicroClave® com swab e então pressionar e girar o dispositivo de administração para dentro do MicroClave® até que esteja preso. Lavar o MicroClave® após cada utilização de acordo com o protocolo da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector MicroClave®, pois o dispositivo é um sistema fechado.

O conector MicroClave® é compatível com luers de diâmetro interno (ID) entre 1,55 mm e 2,8 mm.

Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.


NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

PROIBIDO REPROCESSAR.



Destruir após o uso.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**

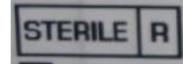

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.

951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74

TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210037

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025