

TORNEIRAS

TORNEIRINHA COM NANOCLAVE

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:
011-AC100 e 011-AC300

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:


A torneirinha com Nanoclave® é indicado para conexão em cateter e em linhas de extensões IV.

DESCRIÇÃO

É uma torneirinha de 4 vias com luer rotativo e conector nanoclave sem agulha que mantém o sistema fechado, prevenindo vazamentos e derramamentos durante o transporte de medicamentos.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-AC100	Torneirinha 4 vias com 1 NanoClave Comprimento: 3,48cm Capacidade: 0,296ml
011-AC300	Torneirinha 4 vias com 3 NanoClave Comprimento: 10,57cm Capacidade: 0,89ml

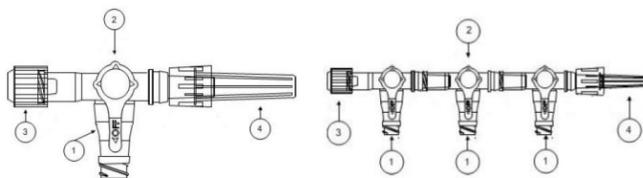

1 – Conector Nanoclave Composição: Policarbonato, polipropileno e silicone. Finalidade: é um conector sistema fechado que serve para conectar as linhas intravenosas.
2 - Torneirinha Composição: Polipropileno e policarbonato. Finalidade: serve para administrar drogas ou solução intravenosa contínuas ou intermitente.
3 – Tampa luer lock Composição: Polietileno Finalidade: Serve para proteger o luer macho enquanto o mesmo não é conectado.
4 – Tampa luer fêmea Composição: Polipropileno Finalidade: Serve para proteger o luer fêmea enquanto o mesmo não é conectado.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades.

MECANISMO DE AÇÃO

A torneirinha com Nanoclave® é um dispositivo que se conecta ao cateter e em linhas de extensões IV formando um sistema fechado e sem agulha. Uso único e estéril.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 - Remova a torneirinha com Nanoclave® da embalagem com técnica asséptica.
- 2 - Lavar a torneirinha, soltando a tampa da porta lateral e girar a alça para expelir o ar. Para administrar ou aspirar através da torneirinha, utilizar as setas direcionais na aba de giro para o uso pretendido.
- Lavar o Nanoclave® e inverter o dispositivo para expelir o ar.
- Lavar o conjunto e conectar ao cateter do paciente.
- Para ter acesso, limpar o Nanoclave® com swab e então pressionar e girar o dispositivo de administração para dentro do Nanoclave® até que esteja preso. Lavar o clave após cada utilização de acordo com o protocolo da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Contém POLICARBONATO.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector NanoClave, pois o dispositivo é um sistema fechado.

O conector NanoClave é compatível com luers de diâmetro interno (ID) entre 1,55 mm e 2,8 mm.

Este dispositivo deve ser substituído de acordo com as Normas atuais e reconhecidas para a terapia I.V.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

PROIBIDO REPROCESSAR.



Destruir após o uso.

O conteúdo da embalagem é estéril. **ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.**



PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210050

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025