



Cateter Allevio™ para Bloqueio de Nervo e GEP (ganglio esfenopalatino)

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

10682

INSTRUÇÕES DE USO


INDICAÇÃO:

Allevio™ é um aplicador descartável usado na cavidade nasal destinado a uso transitório para administração de pequenas quantidades de medicamentos na cavidade nasal para quem sofre de enxaqueca crônica e aguda. É um método rápido, fácil e eficaz de atingir um bloqueio de nervo e gânglio esfenopalatino sem uso de cotonetes, agulhas ou narcóticos sistêmicos. O Allevio emprega um cateter flexível com uma ponta em ângulo para entregar efetivamente lidocaína ao gânglio esfenopalatino sem qualquer desconforto ao paciente.

DESCRIÇÃO

É um cateter flexível, não estéril, com hub e luer rotativo.

ESPECIFICAÇÃO:

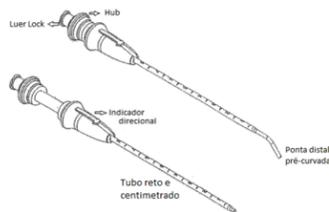

Tamanho: 5F (French)

Comprimento: 8,5cm

Hub com luer lock e ponta distal pré-curvada

Composição: Poliuretano (90A Pellethane®)

Finalidade: serve para conectar com a seringa, forma ângulo de 45°

Indicador direcional e tubo reto

Composição: Poliuretano (55D Pellethane®) Composto: Aço Inoxidável 304 – ISO 7864

Finalidade: Fornece orientação da ponta quando o cateter está inserido. E o tubo guia ponta através da passagem nasal.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 5 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO:

Allevio™ é feito de material poliuretano, livre de látex, de uso único como aplicador nasal descartável. O produto é não estéril e deve ser usado somente durante procedimento não estéril. O Cateter Allevio é constituído por um hub com luer lock rotativo, indicador direcional, tubo reto e centimetrado e uma ponta distal pré-curvada; o luer lock rotativo conecta uma seringa ao cateter permitindo que o médico controle o volume a ser instilado na administração de medicamentos.

INSTRUÇÕES DE USO:

O Cateter Allevio™ é um aplicador para ser usado somente quando a mucosa nasal estiver intacta.

O procedimento seguinte é recomendado para instilar medicamento para dentro da cavidade nasal. Verifique visualmente se há danos na embalagem contendo o Cateter Allevio™, se o produto apresentar quebra ou dano não use o Cateter Allevio™.

O procedimento dura de 10 a 15 minutos.

1. Primeiro deite o paciente com a cabeça estendida;

Pode se aplicar um anestésico topicamente para aliviar o desconforto do paciente, porém, este passo é opcional;

2. Encha uma seringa com a quantidade desejada do medicamento e reserve;

3. Deslize a ponta do Cateter Allevio™ para dentro do tubo para assegurar que o dispositivo é facilmente acionado.

4. O Cateter Allevio™ é preparado retraindo a ponta para dentro do tubo com o indicador direcional virado anteriormente, e logo se inseri na fossa nasal até um ligeiro contato com a parte posterior do conduto nasal justo por cima da concha média ou concha nasal média;

Cuidado: Se ocorrer resistência excessiva ou se o paciente apresentar desconforto significativo, não force o Cateter Allevio™ na passagem nasal.

5. Voltar o Cateter Allevio™ cerca de 3-5 milímetros para que a ponta possa se estender pelo arco da concha média;

6. Quando o cateter estiver no lugar conecte a seringa já preenchida e administre a quantidade desejada do medicamento;

7. Repita esse procedimento na outra narina;

8. O paciente deve permanecer deitado com a cabeça estendida por aproximadamente 10 minutos para se permitir a máxima absorção do anestésico, é normal sentir um excesso de fluido na parte posterior da garganta e esse fluido pode ser ingerido sem perigo.

9. O Cateter Allevio™ deve ser descartado de forma adequada após o uso único no paciente, siga o procedimento padrão da instituição.

Isto é tudo, sem desordem, sem complicações, simplesmente um alívio rápido e eficaz para quem sofre de Enxaqueca crônica e aguda.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Fabricante Recomenda Uso Único.

O Cateter Allevio™ deve ser utilizado apenas por médicos.

O Cateter Allevio™ não deve ser utilizado quando a mucosa nasal estiver irritada ou inchada.

A ponta do Cateter Allevio™ não deve ser forçado para dentro do nariz.

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de usar.

O Cateter Allevio™ é fornecido não estéril e deve ser usado somente durante procedimento não estéril.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL

O Cateter Allevio™ é um dispositivo descartável a ser utilizado apenas uma única vez.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data da fabricação..

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (máximo 27°C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

JET Medical SA

Rue Fritz-Courvoisier 40

2300 La Chaux-de-Fonds - Switzerland - Suíça

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74

TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312219006

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 03/2025