



Dispositivo Para Fixacao de Cateter

Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® Extra Pequeno com óxido de zinco

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam ao modelo comercial: 2200NUZA

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® Extra Pequeno com óxido de zinco é indicado para fixar o cateter a pele do paciente através de um dispositivo adesivo, dando estabilidade adequada, evitando danos e incidência de lesões ao paciente.

DESCRIÇÃO:

É um dispositivo de fixação de cateter neonatal, descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
2200NUZA	2200NUZA - Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® Extra Pequeno com óxido de zinco Comprimento: 5,7cm Largura: 1,778cm

O Dispositivo de fixação do cateter Grip-Lok® Extra Pequeno com óxido de zinco é composto de:

Película - contato com a pele Composição: Resina sintética e óxido de zinco. Sem látex, BPA e PVC
Película - contato com o cateter Composição: Malha de Nylon com adesivo acrílico
Área Central da película Composição: polietileno adesivo
Fixador Composição: Polipropileno


Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 50 unidades e instrução de uso.

MECANISMO DE AÇÃO:

Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® Extra Pequeno com óxido de zinco foi projetado para proporcionar uma barreira flexível e respirável para proteger o local de acesso através de um adesivo que fixará o cateter sob a pele do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Selecione a área de colocação do Grip-Lok®.
- Nota: O cateter já deve estar colocado/inserido.
- Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação do adesivo. A pele precisa estar limpa e seca.
- Levante a dobra de tecido superior e remova o revestimento interior de modo a expor as áreas adesivas.
- Coloque o cateter ou a linha na área central do Grip-Lok® na parte adesiva.
- Pressione suavemente a aba superior em torno das bordas da linha ou cateter para garantir que o adesivo esteja bem preso.
- Segure o Grip-Lok® e remova a película protetora da parte de baixo de um dos lados do Grip-Lok® e fixe na pele. Em seguida, retire outra parte da película protetora e fixe na pele.

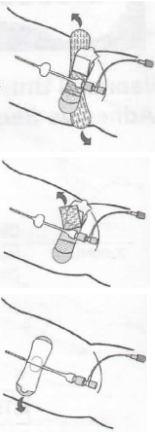

Instruções: Para uma maior proteção da pele, prepare a pele antes da aplicação do dispositivo de fixação.

Nota: A utilização de um cotonete com álcool facilitará a remoção do dispositivo de fixação da pele.

Nota: A reutilização desde dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecções bacterianas.

Nota: Substitua o dispositivo de fixação se estiver sujo ou impregnado de líquido.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Fabricante recomenda Uso Único;
- Não reesterilizar e nem reutilizar;
- Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.
- Não contém Latex.

ESTÉRIL - Esterilizado por Radiação Gama.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE

TIDI Products

570 Enterprise Drive, Neenah
WI 54956
EUA

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha – Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210072

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email:farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 – 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025