



Dispositivo Para Fixacao de Cateter  
Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:  
3601CVC; 3308MCS-MC

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® é indicado para fixar o cateter a pele do paciente através de um dispositivo adesivo. Evitando danos no cateter, estabilidade adequado do cateter e incidência de lesões.

DESCRIÇÃO:

É um dispositivo de fixação de cateter Grip-Lok® PICC e CVC, descartável e estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
3601CVC	Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® PICC e CVC Médio Universal para linhas e tubos tamanho 14 - 40Fr Comprimento: 8,9cm Espessura: 0,152cm
3308MCS-MC	Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® MCS Medcomp Diálise CVC Comprimento: 8,9cm Espessura: 0,152cm

O Dispositivo de fixação do cateter Grip-Lok® é composto de:

Película - contato com a pele Composição: Filme de Poliuretano laminado em falso tecido microporoso com fita adesiva, com um adesivo acrílico de grau médico. Sem látex, BPA e PVC
Película - contato com o cateter Composição: Malha de Nylon com adesivo acrílico
Área Central da película Composição: polietileno adesivo
Fixador Composição: Polipropileno

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso.

MECANISMO DE AÇÃO:


Dispositivo de Fixação de Cateter Grip-Lok® foi projetado para proporcionar uma barreira flexível e respirável para proteger o local de acesso através de um adesivo que fixará o cateter sob a pele do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Selecione a área de colocação do Grip-Lok®.
- Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação do adesivo. A pele precisa estar limpa e seca. Em alguns doentes, pode ser necessária a preparação da pele ou remoção de pêlos para uma melhor aderência.
- Levante a dobra de tecido superior e remova o revestimento interior de modo a expor as áreas adesivas.
- Deslize o Grip-Lok® por baixo do Hub do cateter, centralizando-o na área adesiva exposta com a extremidade distal do conector prolongando-se para além do Grip-Lok®.

- Prenda a dobra superior por cima do cateter e aplique pressão firme na área de tecido sobre o adesivo e ao redor e entre os lúmens.
- Segure o Grip-Lok® e remova a película protetora da parte de baixo de um dos lados do Grip-Lok®, e depois do outro, para fixar na posição pretendida na pele.

Instruções: Para uma maior proteção da pele, prepare a pele antes da aplicação do dispositivo de fixação.

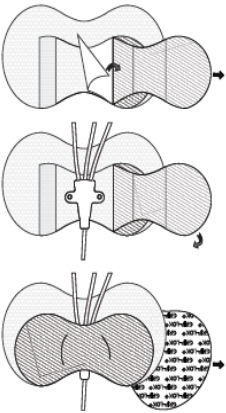

Nota: A utilização de um cotonete com álcool facilitará a remoção do dispositivo de fixação da pele.

Nota: A reutilização desde dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecções bacterianas.

Nota: Substitua o dispositivo de fixação se estiver sujo ou impregnado de líquido.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Fabricante recomenda Uso Único;
- Não reesterilizar e nem reutilizar;
- Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.
- Não contém Latex.

ESTÉRIL - Esterilizado por Radiação Gama.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

FABRICANTE:

**TIDI Products**  
570 Enterprise Drive, Neenah  
WI 54956  
EUA

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**  
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210071  
Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)  
Atendimento ao cliente: 11-4067-5011; 11-3849-8992

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email: [farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025