



PROTEÇÃO ADESIVA PARA BANHO

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais: 50004-CSE; 50005-CSE; 50010-CSE; 50010-RBX; 50011-CSE; 50012-CSE; 50013-CSE; 50015-CSE; 50022-CSE

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

AquaGuard foi projetada para cobrir e manter feridas, curativos e locais intravenosos secos durante o banho. As aplicações comuns incluem linhas PICC, portas, locais subclávios e jugulares internos, pequenos locais cirúrgicos e outros locais no peito ou nas costas. Este produto pode ser aplicado por profissionais de saúde ou pacientes.

DESCRIÇÃO:

AquaGuard é uma barreira impermeável à umidade que permite que um médico ou paciente cubra feridas, curativos e locais intravenosos e os mantenha secos durante o banho. Consiste em uma barreira oclusiva de polietileno com uma borda adesiva suave e está disponível em vários tamanhos.

ESPECIFICAÇÃO:

Código/Fábrica	Descrição	Uso	Caixa Embarque	Embalagem
50004-CSE	Proteção Adesiva para Banho 10 x 10cm	Pequenos locais cirúrgicos, pediatria, toracostomias tubulares, adesivos transdérmicos, cateteres Bivac	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50005-CSE	Proteção adesiva para Banho 13 x 13cm	Pequenos locais cirúrgicos, pediatria, cateteres de Hickman, portas, estomas	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50010-CSE	Proteção Adesiva para Banho 18 x 18cm	Pediatria, IVs periféricos, pequenos locais cirúrgicos, adesivos transdérmicos	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50010-RBX	Proteção Adesiva para Banho 18 x 18cm	Pediatria, IVs periféricos, pequenos locais cirúrgicos, adesivos transdérmicos	10 Pacotes = 50 unidades	1 Pacote = 5 unidades
50011-CSE	Proteção Adesiva para Banho 25 x 31cm	Linhas PICC, estomas, incisões no joelho/quadril/ombro, cateteres de diálise, ostomias	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50012-CSE	Proteção Adesiva para Banho 36 x 30cm	Incisões no joelho/quadril/ombro, ostomias, curativos grandes, grandes locais cirúrgicos	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50013-CSE	Proteção Adesiva para Banho 31 x 61cm	Incisões abdominais, grandes curativos, grandes locais cirúrgicos, mastectomias, incisões ortopédicas	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50015-CSE	Proteção Adesiva para Banho 23 x 23cm	Cateteres Hickman, portas, estomas, cateteres de diálise, linhas PICC, cateteres IJ	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades
50022-CSE	Proteção Adesiva para Banho 18 x 56cm	Incisões nas costas, locais cirúrgicos longos e estreitos, esternotomias	14 Pacotes = 98 unidades	1 Pacote = 7 unidades

INSTRUÇÕES DE USO:

Certifique-se de que o tamanho adequado do AquaGuard seja selecionado antes da aplicação. Para uma lista detalhada dos tamanhos disponíveis e áreas de cobertura, visite <http://www.tidiproductions.com/ifu>

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6



Instruções para aplicação

1. Antes da aplicação, mantenha a pele seca e livre de óleos e loções. Um lenço umedecido com álcool pode ser usado para preparar a pele para a aplicação.

2. Prepare o AquaGuard para aplicação formando "abas" nas tiras de suporte em cada canto. Veja a Figura 1.

3. Usando a aba, remova a tira de suporte superior e aplique o adesivo subjacente na pele. Veja a Figura 2.

- Para locais subclávios: Coloque o adesivo na pele acima da linha central ou curativo da porta.

- Para locais jugulares internos: Coloque o adesivo logo acima do curativo seguindo abaixo do contorno da linha da mandíbula e, se possível, em direção ao queixo.

4. Remova individualmente as tiras de suporte laterais, pregueie cada lado e aplique. Veja a Figura 3.

- Para locais subclávios: Remova a tira lateral e crie uma "prega" no meio enquanto coloca o adesivo na pele. Aperte a prega e dobre de um lado para o outro enquanto aplica pressão para garantir uma boa adesão.

Repita para o outro lado.

- Para locais jugulares internos: peça ao paciente para inclinar o pescoço para longe do local. Remova a tira lateral e coloque ao longo do lado do local do curativo. Se for necessário fazer pregas, aperte a prega e dobre de um lado para o outro enquanto aplica pressão para garantir uma boa adesão. Repita para o outro lado.

5. Remova a tira inferior e coloque logo abaixo do local do curativo, fazendo pregas se necessário. Veja a Figura 4.

6. Massageie a borda adesiva contra a pele para garantir a vedação. Veja as Figuras 5 e 6.

Instruções para remoção

1. Após o banho, seque suavemente a área ao redor antes da remoção.

2. Puxe suavemente para baixo na direção do crescimento dos pelos e descarte.

Observação: pode ocorrer um pouco de umidade devido à transpiração.

CONTRA-INDICAÇÕES:

AquaGuard é destinada apenas para banho e não é recomendada para natação ou submersão subaquática. AquaGuard não substitui curativos primários.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Para melhores resultados, um cuidador deve aplicar o produto AquaGuard no paciente. Aplique AquaGuard na pele limpa e seca. Não use loção ou creme antes de aplicar. Não levante e/ou tente reposicionar AquaGuard após a colocação. Não use se estiver furado ou apresentar sinais de desgaste. AquaGuard é um produto de uso único. Se reutilizado, pode não fornecer uma barreira eficaz durante o banho. Se sensibilidade ou irritação se desenvolver, interrompa o uso.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação..

FABRICANTE:

TIDI Products

570 Enterprise Drive, Neenah

WI 54956

EUA

IMPORTADOR:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74 TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Email: farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

VERSÃO DESTA INSTRUÇÃO DE USO: Rev. 00/2025