



Suportes de cateteres/tubos
Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok®

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:
3400LFC e 3600PFC

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® foi projetado para a fixação adesiva do adaptador, tubo ou linha do cateter de 2 a 3 vias á pele do paciente.

DESCRIÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® é um dispositivo de estabilização descartável, estéril, flexível e respirável que fixará o adaptador, tubo ou linha do cateter sob a pele do paciente.

ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
3400LFC	Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® 8-30F Grande Comprimento: 15,9cm Largura: 5,7cm
3600PFC	Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® 8-30F Pequeno Comprimento: 8,9cm Largura: 6,4cm

O Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® é composto de:

Adesivo para Curativo; Filme de uretano laminado a uma fita de falso tecido, com adesivo acrílico de grau médico;
Adesivo Padrão: Composto de Acrílico;
Fecho do grampo: Composto de polipropileno de baixo perfil;
Alça: Nylon tricotado de baixo perfil;
Forro: Papel Kraft revestido de silicone;
Adesivo de Silicone: Filme de poliéster transparente revestido com adesivo de silicone permanente;
Forro de Silicone: Revestimento de silicone fluorado removível;
Espuma: Polietileno reticulado.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso.

MECANISMO DE AÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Cateter Foley Grip-Lok® é um dispositivo de estabilização descartável e foi projetado para proporcionar uma barreira flexível e respirável para proteger o local de acesso através de um adesivo que fixará o cateter sob a pele do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Selecione o Grip-Lok® de tamanho apropriado para a sua aplicação.
2. Seleccione a área de colocação do Grip-Lok®.
Nota: O tubo/cateter já deve estar colocado/inserido.
3. Para uma proteção adicional da pele, prepare a pele de acordo com o protocolo da Instituição para aplicação do adesivo. Poderá ser necessária a preparação da pele ou a remoção de pêlos em determinados pacientes para uma melhor aderência.
4. Segure o Grip-Lok® no respectivo lugar enquanto retira o revestimento de papel de um lado, depois do outro, para fixar na superfície da pele.
5. Abra e separe as abas de tecido superiores.
6. Posicione o lúmen do dreno entre a tira de espuma e a parte traseira das abas do tecido.
7. Posicione o cateter de modo a que a bifurcação esteja na parte central do orifício das abas de tecido superior.
8. Fixe uma das abas de tecido sobre o lúmen do dreno e a outra sobre o cateter abaixo da bifurcação.
9. Ajuste a fixação do cateter aplicando os pontos da aba mais apertados ou soltos conforme necessário.
10. Substitua o dispositivo de fixação se estiver sujo ou impregnado de líquido e se apresentar sinais de desgaste ou danos.
11. Para efetuar a retirada do dispositivo, a utilização de um cotonete com álcool facilitará a remoção do dispositivo de fixação da pele.

Nota: Descarte de acordo com orientações e protocolos da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O Fabricante recomenda Uso Único;
- Não utilize se existir dano no sistema de barreira estéril do produto ou da respectiva embalagem.
- Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.
- Não contém Latex.
- A reutilização desse dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecções bacterianas.
- Caso venha a ter eritema cutâneo grave, prurido, edema ou irritação da pele, consulte o seu médico visto que tal poderá ser sinal de uma reação alérgica.
- Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

ESTÉRIL - Esterilizado por Radiação Gama.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 20% a 80%.

FABRICANTE:

TIDI Products
570 Enterprise Drive, Neenah
WI 54956
EUA

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210102

Site: www.medcorpnet.com.br
Atendimento ao cliente: 11-4067-5011; 11-3849-8992

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 01.2026