



Suportes de cateteres/tubos
Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplica ao modelo comercial:

3401LNG

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande foi projetado para a fixação de adaptador, tubo ou linha do cateter a pele do paciente.

DESCRIÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande é um dispositivo de estabilização descartável, estéril, flexível e respirável que fixará o adaptador, tubo ou linha do cateter sob a pele do paciente.

ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
3401LNG	Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande Comprimento: 10,8cm Largura: 4,3cm

O Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande é composto de:

Adesivo para Curativo: Filme de uretano laminado a uma fita de falso tecido, com adesivo acrílico de grau médico.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso.

MECANISMO DE AÇÃO:

O Dispositivo de Fixação de Tubo Grip-Lok® Nasogástrico Grande é um dispositivo de estabilização descartável foi projetado para proporcionar uma barreira flexível e respirável para proteger o local de acesso através de um adesivo que fixará o cateter sob a pele do paciente.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Selecione a área de colocação do dispositivo de fixação.

Nota: O cateter/ tubo já deve estar colocado/inserido no paciente.

2. Para uma proteção adicional da pele, prepare a pele de acordo com o protocolo da Instituição para aplicação do adesivo. Poderá ser necessária a preparação da pele ou a remoção de pêlos em determinados pacientes para uma melhor aderência.

3. Retire um lado do revestimento protetor do dispositivo Grip-Lok® .

4. Coloque o dispositivo Grip-Lok® de forma centralizada no nariz com as porções das abas finas a prolongarem-se em direção à extremidade do nariz.

5. Pressione o adesivo exposto num lado do nariz e em direção à face.

6. Retire o outro lado do revestimento protetor do dispositivo Grip-Lok® e pressione o adesivo exposto no outro lado do nariz e em direção à face.

7. Retire o revestimento protetor adesivo da parte inferior de um lado das porções das abas finais que se prolongam para além da extremidade do nariz e envolva em torno do tubo.

8. Retire a outra parte do revestimento protetor adesivo das porções das abas finas e envolva em torno do tubo na direção oposta.

9. Substitua o dispositivo se estiver sujo ou impregnado de líquido e se apresentar sinais de desgaste ou danos.

Nota: A utilização de um cotonete com álcool facilitará a remoção do dispositivo de fixação da pele.

Nota: Para facilitar a remoção do Grip-Lok® em relação ao tubo, dobre sobre si mesma a extremidade das porções das abas finas.

Nota: Descarte de acordo com orientações e protocolos da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- O Fabricante recomenda Uso Único;

- Não utilize se existir dano no sistema de barreira estéril do produto ou da respectiva embalagem.

- Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

- Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

- Não contém Latex.

- Caso venha a ter eritema cutâneo grave, prurido, edema ou irritação da pele, consulte o seu médico visto que tal poderá ser sinal de uma reação alérgica.

- A reutilização desde dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, reações alérgicas ou infecções bacterianas.

- Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

ESTÉRIL - Esterilizado por Radiação Gama.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 20% a 80%.

FABRICANTE:

TIDI Products

570 Enterprise Drive, Neenah

WI 54956

EUA

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.

Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)

CNPJ N. 67.630.541/0001-74 TEL: (011) 4067-5011

Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210099

Site: www.medcorpnet.com.br

Atendimento ao cliente: 11-4067-5011; 11-3849-8992

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional .

Solicitar pelo canal de atendimento:

Email: farmaceuticoresponsal@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 01.2026