

## AGULHAS

### AGULHA DE HUBER COM EXTENSÃO WING SAFE™ COM CONECTOR

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

BHY-1910 ; BHY-1915; BHY-2010; BHY-2015; BHY-2034 ; BHY-2210; BHY-2234; BHY-2250;

## INSTRUÇÕES DE USO

### INDICAÇÃO:


Agulha de Huber é indicado para punção e acesso do cateter com port implantável, para infusão de medicamentos e quimioterápicos, com tubo extensor e asas perpendiculares para fixação.

### DESCRIÇÃO

É uma agulha de huber com extensão microbore, clamp, conector sistema fechado, luer e asa flexível.

### ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
BHY-1910	Agulha de Huber 19 GA x 2,54 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Marrom Volume Priming: 0,4ml
BHY-1915	Agulha de Huber 19 GA x 3,81 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Marrom Volume Priming: 0,4ml
BHY-2010	Agulha de Huber 20GA x 2,54 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Amarelo Volume Priming: 0,4ml
BHY-2015	Agulha de Huber 20 GA x 3,81 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Amarelo Volume Priming: 0,4ml
BHY-2034	Agulha de Huber 20 GA x 1,90 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Amarelo Volume Priming: 0,4ml
BHY-2210	Agulha de Huber 22 GA x 2,54 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Preto Volume Priming: 0,4ml
BHY-2234	Agulha de Huber 22 GA x 1,90 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Preto Volume Priming: 0,4ml
BHY-2250	Agulha de Huber 22 GA x 1,27 cm com extensão microbore de 25cm, 2 Clamps, 1 Conector sistema fechado, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa Flexível Preto Volume Priming: 0,4ml

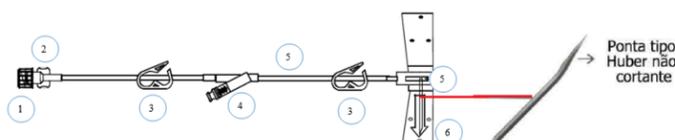

Item nº	Descrição Detalhada
1	Tampa Composição: Polipropileno
2	Luer Fêmea Composição: poliéster
3	Clamp Composição: Polipropileno
4	Conector em Y Composição: Acrílico, poliuretano e silicone
4	Tubo Microbore Composição: PVC sem DEHP
5	Asa fixa Composição: PVC sem DEHP
6	Agulha Composição: Aço Inoxidável 304

Acondicionado individualmente em embalagem blister em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 12 unidades e instrução de uso

### MECANISMO DE AÇÃO

Agulha de Huber é um dispositivo para punção e acesso do cateter para infusão de medicamentos e quimioterápicos.

### INSTRUÇÕES DE USO:

1-Remover a agulha da embalagem;


2- Estabilizar o port exercendo suave pressão descendente com a mão não-dominante;



3- Com a mão dominante segure e retire firmemente a agulha em um movimento ascendente e contínuo;



4- Com o dedo e o polegar da mão não-dominante, deslize as asas sobre a agulha e exerça pressão suficiente para que elas se travem;

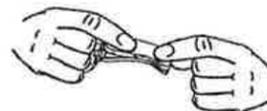

5- Descarte imediatamente a agulha em um recipiente de objetos cortantes.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.
- A lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido médico. Apenas funcionários de serviços de saúde qualificados devem inserir, manipular e remover estes dispositivos.
- Examine cuidadosamente a embalagem antes de abrir para confirmar a respectiva integridade e que está dentro do prazo de validade. O produto é fornecido numa embalagem esterilizada e é apirogênico. Não utilizar se a embalagem estiver danificada, aberta ou fora do prazo de validade.

### • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

**STERILE EO**

- **PROIBIDO REPROCESSAR.**
- **NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.**



- Manter a embalagem unitária intacta.
- Armazenar em local seco, longe da luz do sol e em temperatura de 5°C a 40°C.
- Não contém látex e DEHP.

### PRAZO DE VALIDADE

3 anos a partir da data de esterilização

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (5° C a 40° C).  
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 70%.

### FABRICANTE:

**CHURCHILL MEDICAL SYSTEMS, INC**  
87 Venture Drive Dover, NH 03820 - Estados Unidos

### DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

**Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.**  
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)  
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011  
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210065

Site: [www.medcorpnet.com.br](http://www.medcorpnet.com.br)

### Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:  
Email: [farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br](mailto:farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br) ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025