

AGULHAS

AGULHA DE HUBER COM EXTENSÃO WING SAFE™

A Medcorp, informa que as instruções de uso a seguir se aplicam aos modelos comerciais:

BHS-1910; BHS-2010; BHS-2015; BHS-2034; BHS-2210; BHS-2234; BHS-2250.

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:


Agulha de Huber é indicado para punção e acesso do cateter com port implantável, para infusão de medicamentos e quimioterapicos, com tubo extensor e asas perpendiculares para fixação.

DESCRIÇÃO

É uma agulha de huber com extensão microbore, clamp, luer e asa flexível.

ESPECIFICAÇÃO:

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
BHS- 1910	Agulha de Huber 19 GA x 2,54cm, com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Marrom Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2010	Agulha de Huber 20 GA x 2,54cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Amarelo Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2015	Agulha de Huber 20 GA x 3,81cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Amarelo Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2034	Agulha de Huber 20 GA x 1,905cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Amarelo Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2210	Agulha de Huber 22 GA x 2,54cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Preto Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2234	Agulha de Huber 22 GA x 1,905cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Preto Volume de priming 0,3 ml
BHS- 2250	Agulha de Huber 22 GA x 1,27cm com extensão microbore de 25cm, 1 Clamp, 1 Luer Lock fêmea, Asa fixa flexível Preto Volume de priming 0,3 ml

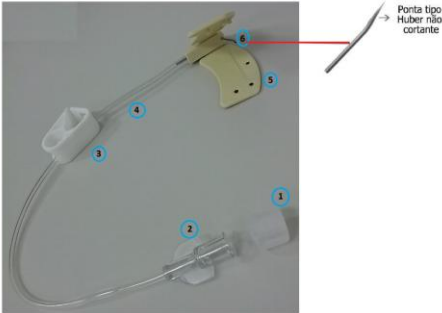

Item nº	Descrição Detalhada
1	Tampa Composição: Polipropileno
2	Luer Fêmea Composição: poliéster
3	Clamp Composição: Polipropileno
4	Tubo Microbore Composição: PVC sem DEHP
5	Asa fixa Composição: PVC sem DEHP
6	Agulha Composição: Aço Inoxidável 304

Acondicionado individualmente em embalagem blister em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 12 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

Agulha de Huber é um dispositivo para punção e acesso do cateter para infusão de medicamentos e quimioterapicos.

INSTRUÇÕES DE USO:

1-Remover a agulha da embalagem;


2- Estabilizar o port exercendo suave pressão descendente com a mão não-dominante;



3- Com a mão dominante segure e retire firmemente a agulha em um movimento ascendente e contínuo;



4- Com o dedo e o polegar da mão não-dominante, deslize as asas sobre a agulha e exerça pressão suficiente para que elas se travem;

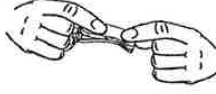

5- Descarte imediatamente a agulha em um recipiente de objetos cortantes.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.
- A lei federal (EUA) limita a venda deste dispositivo a médicos ou a pedido médico. Apenas funcionários de serviços de saúde qualificados devem inserir, manipular e remover estes dispositivos.
- Examine cuidadosamente a embalagem antes de abrir para confirmar a respectiva integridade e que está dentro do prazo de validade. O produto é fornecido numa embalagem esterilizada e é apirogênico. Não utilizar se a embalagem estiver danificada, aberta ou fora do prazo de validade.
-

• ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

STERILE EO

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.

- PROIBIDO REPROCESSAR.



- Manter a embalagem unitária intacta.
- Armazenar em local seco, longe da luz do sol e em temperatura de 5°C a 40°C.
- Não contém látex e DEHP.

PRAZO DE VALIDADE

3 anos a partir da data de esterilização

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (5° C a 40° C).
Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 70%.

FABRICANTE:

CHURCHILL MEDICAL SYSTEMS, INC
87 Venture Drive Dover, NH 03820 - Estados Unidos

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.
Av.Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5 - 09950-300 - Piraporinha – Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74 - TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Notificação ANVISA nº 10312210066

Site: www.medcorpnet.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Esta Instrução de uso do produto pode ser obtida em formato impresso, sem custo adicional.

Solicitar pelo canal de atendimento:
Email: farmaceuticoresponsavel@medcorpnet.com.br ou telefone: 11 - 4067-5011 / 3849 - 8992

Verificar se a versão indicada nesta instrução de uso é a mesma do que consta no rótulo do produto.

VERSÃO DESTA INTRUÇÃO DE USO: Rev. 04/2025